

KATALOG 2026

X-ESTETIK

URZĄDZENIA KOSMETYCZNE




X-LEVAGE
PRO



X-ESTETIK

**Laser Tulowy 1927 nm & Erbowo- szklany 1550 nm
X-Levage Erbo**

Cena urządzenia 129 000 zł




X-Levage Erbo

Laser frakcyjny o podwójnej długości fali 1550 nm + 1927 nm


Nieablacyjny laser frakcyjny do resurfacingu skóry

Zaprojektowany, by odmłodzić wygląd skóry w trakcie jednego zabiegu – bez operacji i bez iniekcji

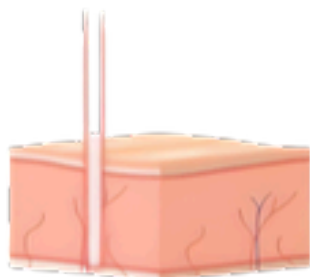

1550 nm – zapewnia efekt termiczny w skórze właściwej


1927 nm – działa powierzchniowo, powodując nieablacyjne lub mikroablacyjne uszkodzenie naskórka oraz koagulację i efekt termiczny w skórze właściwej

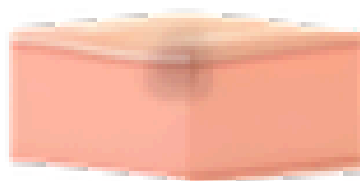

Nieablacyjny: Erbowo- szklany 1550 nm

Działa termicznie w obrębie skóry właściwej, wywołuje denaturację białek.


Stosowany głównie do odmładzania skóry. Krótki okres rekonwalescencji.

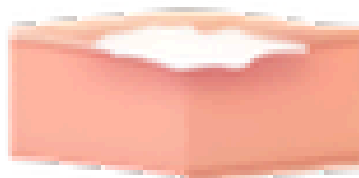

Mikroablacyjny – Tulowy 1927 nm

Oddziałuje na granicę naskórka i skóry właściwej, powodując koagulację i denaturację tkanek.

Wykorzystywany głównie do rozjaśniania skóry. Krótki czas gojenia.

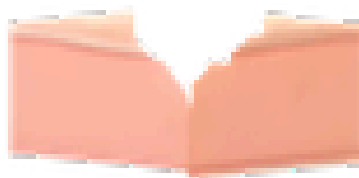

Ablacyjny – CO₂ 10 600 nm

Stosowany do resurfacingu i odmładzania skóry.

Wysoka skuteczność, ale też większe ryzyko, w tym powstawania pozapalnej hiperpigmentacji (PIH). Dłuższy okres rekonwalescencji w porównaniu z metodami nieablacyjnymi.



X-Levage Erbo

Zastosowania:

Usuwanie zmarszczek: kurze łapki, zmarszczki mimiczne, czołowe, drobne linie i bruzdy.

Terapia trądziku: blizny potrądzikowe, ślady po trądziku, rozstępny, nierówności skóry.

Leczenie fotostarzenia skóry: rozszerzone pory, wiotkość i utrata elastyczności, matowy i nierówny koloryt, poprawa struktury i jakości skóry.



Szerokie zastosowanie

Zabieg poprawia strukturę i jakość skóry, wspomaga rozjaśnianie cery, odmładzanie oraz zwiększenie elastyczności skóry.

Pomaga w ogólnej regeneracji, wyrównaniu kolorytu i przywróceniu zdrowego, świeżego wyglądu.

Skuteczniejsze działanie

Laser dociera do skóry właściwej i może być stosowany na różnych obszarach, co pozwala uzyskać lepszy efekt resurfacingu skóry i widoczną poprawę jej wyglądu.

Większy komfort zabiegu

Szybkie i równomierne rozproszanie wiązki lasera umożliwia szybką regenerację skóry przy minimalnych skutkach ubocznych.



X-Levage Erbo

Zalety:

Oryginalny, nieinwazyjny zabieg frakcyjnego resurfacingu – poprawia koloryt, strukturę i blask skóry z oznakami starzenia, uszkodzonej słońcem, z bliznami potrądzikowymi i pooperacyjnymi.

Działa zarówno powierzchniowo, jak i głęboko – system wykorzystuje technologię lasera z podwójnym włóknem.


Szybkie usuwanie przebarwień – długość fali tulowej skutecznie działa w powierzchniowych warstwach skóry.

Wszechstronność zabiegowa – możliwość leczenia różnych problemów skórnych na wszystkich typach skóry, tam gdzie jest to wskazane.

Inteligentny system operacyjny

Bezpieczny, wygodny i prosty w obsłudze.





Dostępne długości fal: 1550 nm i 1927 nm

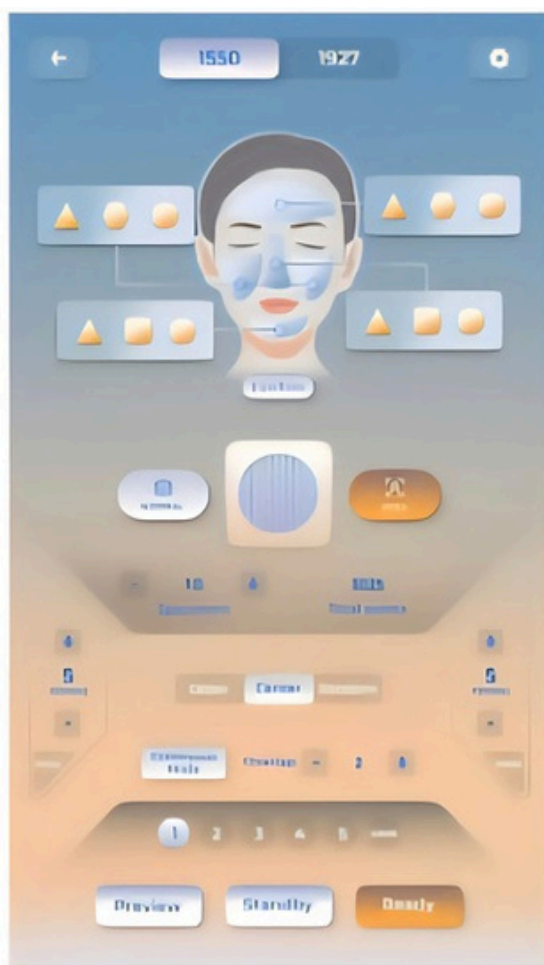

X-Levage Erbo

Wielopunktowe prostokątne wzory ognisk

Różne wzory skanowania, które można dobrać w zależności od obszaru zabiegowego i rodzaju tkanki. Umożliwia precyzyjny dobór energii i lokalizacji dla różnych typów tkanek, co pozwala skutecznie przeprowadzić resurfacing skóry.

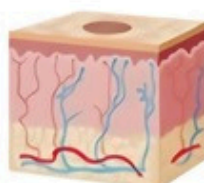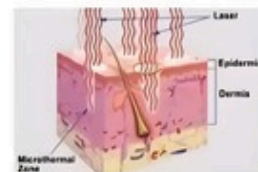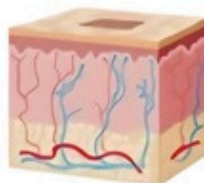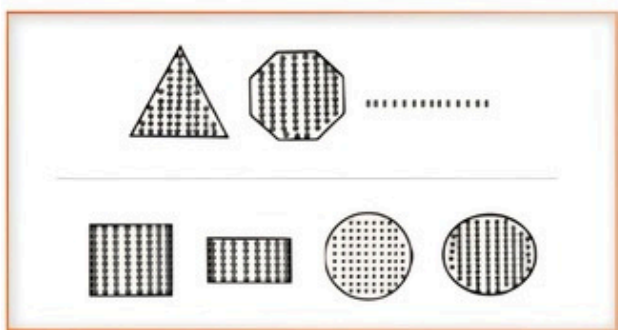

Głowica frakcyjna

Wyposażona w unikalne rolki przesuwne, które umożliwiają płynny, szybki i wygodny zabieg.



Końcówka frakcyjna z rolkami



Końcówka frakcyjna



SPECYFIKACJA

Długość fali:	1550 nm & 1927 nm
Moc lasera:	30 W
Dostarczenie wiązki:	światłowód optyczny
Końcówki zabiegowe:	2
Czas trwania impulsu:	0,1 ms – 5 ms
Rozmiar punktu:	1 × 1 mm – 20 × 20 mm
Maksymalna moc mJ:	75 mJ
Tryb skanowania:	kolejność, środek lub losowy
System chłodzenia:	powietrze
Wzory skanowania:	prostokąt, trójkąt, okrąg, sześciokąt,
Funkcje:	elipsa, linia usuwanie blizn i zmarszczek, lifting twarzy, ujędrnianie skóry



X-ESTETIK

Laser Tulowy X-Levage Pro

Cena urządzenia 105 000 zł





X-LEVAGE
PRO



Laser Tulowy 1927mm X-Levage Pro

Długość fali lasera tulowego 1927 nm wnika głębiej w dolną część naskórka i skóry właściwej, nie powodując złuszczenia się górnej warstwy. Ta konkretna warstwa to miejsce, w którym znajduje się większość pigmentacji skóry. Pigmentacje są następnie rozbijane na małe fragmenty i wchłaniane przez komórki odpornościowe, odnawiając uszkodzoną skórę i stymulując produkcję kolagenu. To skutecznie ukierunkowuje i leczy melasmę, piegi, plamy słoneczne i plamy starcze.

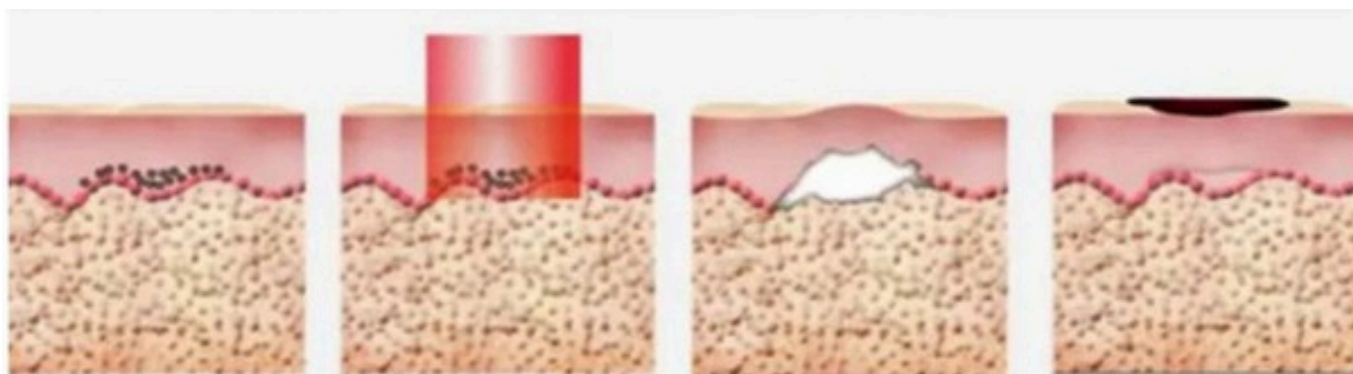

Laser Tulowy 1927nm X-Levage Pro





Zastosowanie:

1. Poprawa zmarszczek: suche linie, drobne linie, rozstępy, wiotkość skóry.
2. Stymulacja regeneracji kolagenu i opóźnienie starzenia.
3. Rozjaśnienie skóry; nierówny koloryt skóry.
4. Zmniejszenie blizn: blizny potrądzikowe i chirurgiczne itp.
5. Usuwanie przebarwień: piegry, ostuda, melasma, blizny potrądzikowe, plamy starcze, plamy słoneczne.
6. Poprawa rozszerzonych porów i szorstkiej skóry.
7. Wprowadzenie produktów do pielęgnacji skóry.
8. Poprawa łysienia łojotokowego itp.

Interfejs użytkownika

✓ Inteligentny ✓ Wygodny ✓ Stylowy ✓ Przyjazny

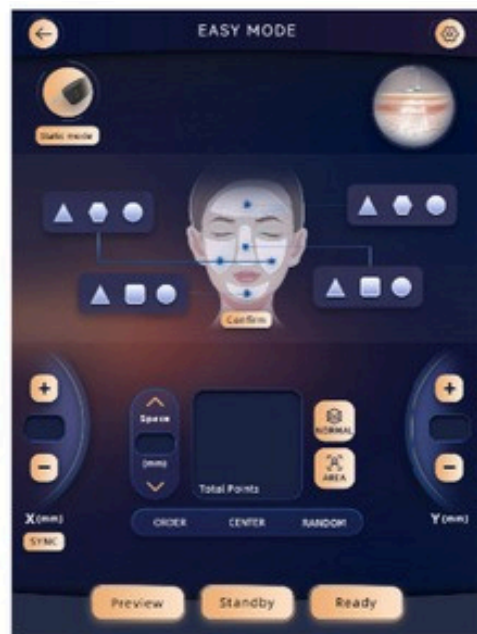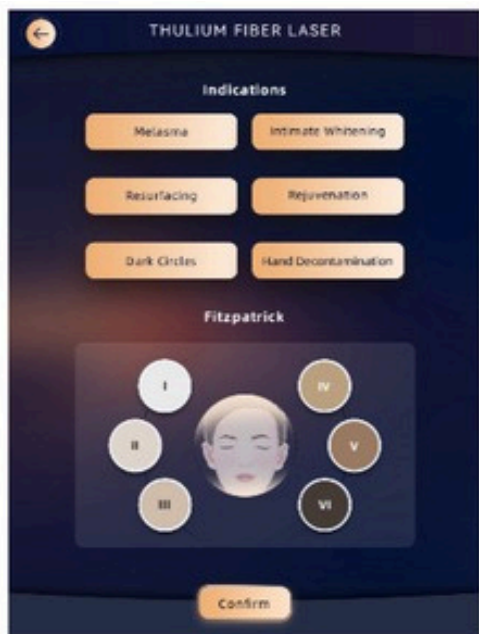


Cechy lasera tulowego 1927nm

- Podwójny efekt ablacyjny i nieablacyjny, bezpieczniejszy i krótszy czas rekonwalescencji.

- Mniejsze wchłanianie wody i głębsza penetracja.

- Lepsze efekty leczenia:
Głębokość penetracji i energia są skoncentrowane pomiędzy dolną częścią naskórka i górną częścią skóry właściwej.

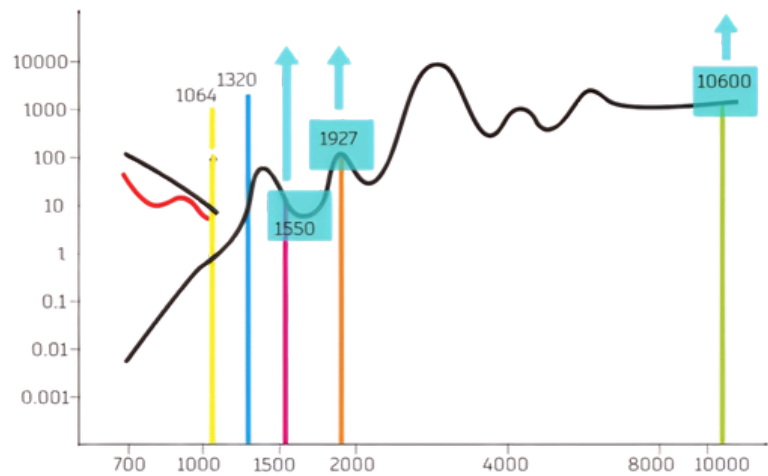


- Niskie koszty utrzymania dzięki niez używalności i długiej żywotności włókna tulowego.


- Szerokość impulsu 0,1us-5ms powoduje mniejszy ból, co oznacza brak znieczulenia i krótszy czas przestoju.

- Inteligentny, przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia użytkownikom wykonywanie bardziej stabilnych i dokładnych zabiegów.

- Wyposażony w 2 wtykowe głowice zabiegowe (głowica frakcyjna + głowica z rolkami), wygodniejszy, bardziej kompleksowy, bardziej wydajny.

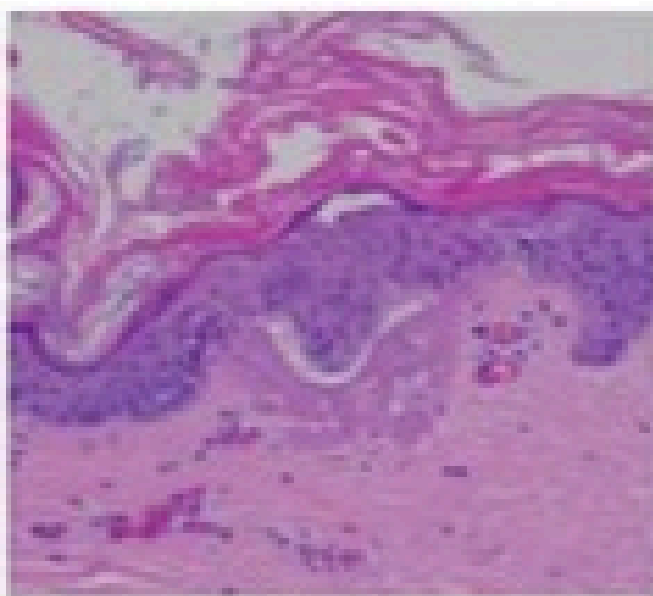


Leczenie nieablacyjne

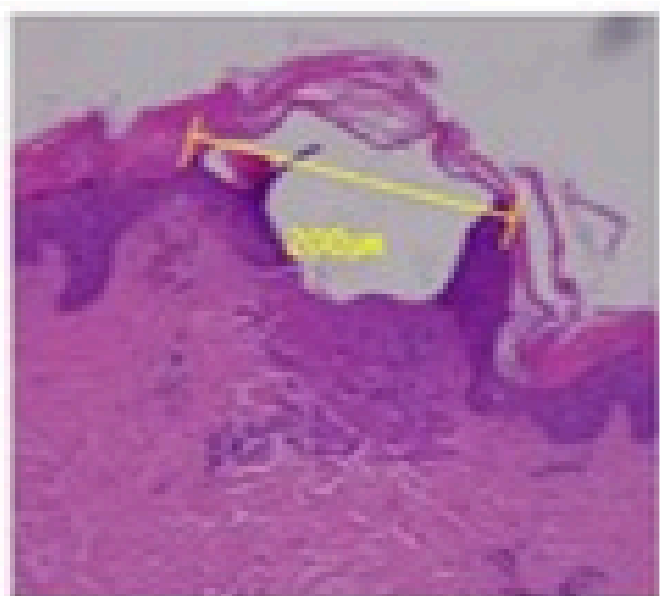

Leczenie ablacyjne

Laser Tulowy 1927nm X-Levage Pro

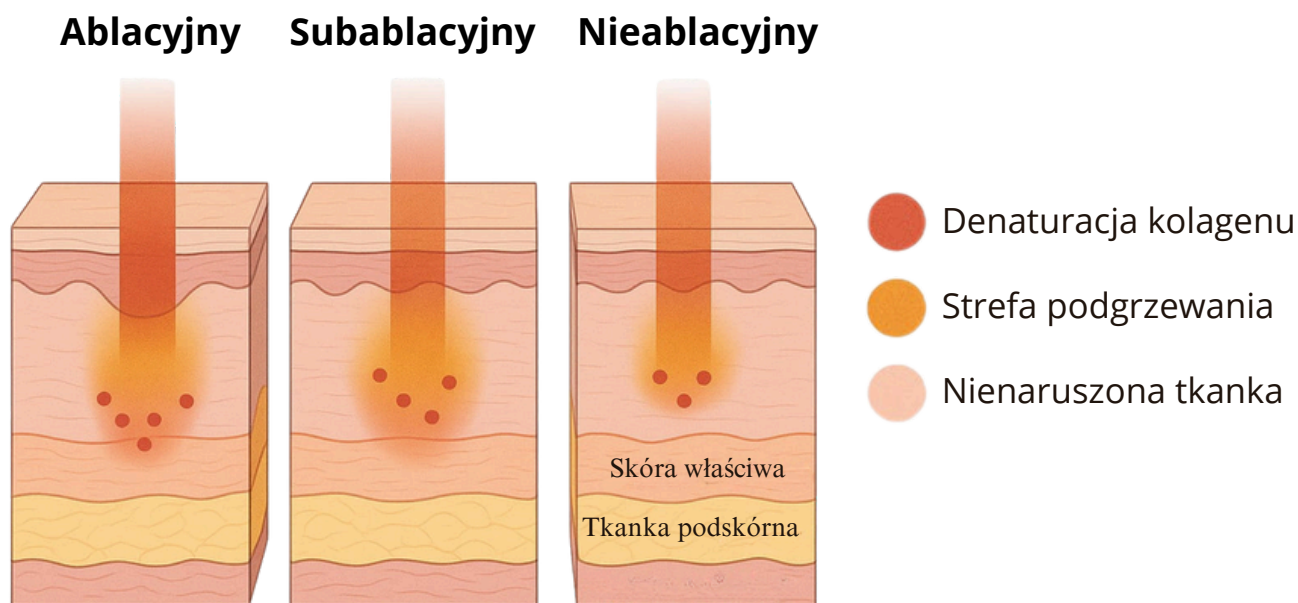

Leczenie ablacyjne:

Mechanizm: wysokie energie → gwałtowne odparowanie wody → powstają mikroubytki (kraterki) w naskórku i powierzchniowych warstwach

Efekt biologiczny: intensywne stymulacja fibroblastów, mocny remodeling kolagenu i elastyny.

Rezultaty: spłycenie blizn, rozstępów i głębszych zmarszczek, silne odmłodzenie i przebudowa skóry, efekt liftingu.

Rekonwalescencja: 5-10 dni, rumień, złuszczenie, możliwy obrzęk.

Leczenie subablacyjne:

Mechanizm: średnie energie → mikrouszkodzenia termiczne w skórze właściwej, bez odparowania naskórka.

Efekt biologiczny: denaturacja kolagenu, mikrokoagulacja, przyspieszona regeneracja i neokolageneza.

Rezultaty: poprawa jędrności i gęstości skóry, zmniejszenie porów i drobnych zmarszczek, wyrównanie kolorytu, lepsza struktura skóry.

Rekonwalescencja: 1-3 dni (delikatne zaczerwienienie, lekki obrzęk, bez wyraźnego złuszczenia).

Leczenie nieablacyjne:

Mechanizm: niskie energie → głębokie, równomierne podgrzewanie skóry właściwej, bez przerywania ciągłości naskórka.

Efekt biologiczny: stymulacja kolagenu i elastyny poprzez łagodną termolizę, poprawa mikrokrążenia.

Rezultaty: efekt „skin tightening” (delikatne ujędrnienie), subtelne wygładzenie skóry, odświeżenie i poprawa jakości cery.

Rekonwalescencja: praktycznie brak – lekki rumień ustępujący po kilku godzinach.

Laser Tulowy 1927nm X-Levage Pro

Szerokość impulsu 0,1 ms-5 ms powoduje mniejszy ból, co oznacza brak znieczulenia i krótszy czas rekonwalescencji.

W porównaniu z leczeniem laserem CO2 jest mniej bolesny, mniejsze wchłanianie wody, głębsza penetracja, lepsze rezultaty leczenia regeneracji kolagenu w skórze właściwej, krótszy czas rekonwalescencji, bezpieczniejsze leczenie.

Głowica skanująca z rolkami może być obsługiwana przez przesuwanie. Bardziej wydajna i wygodna



Elastyczność skóry, tekstura i drobne zmarszczki



Melasma

Poprawa wypadania włosów

Pigmentacja

Efekty



SPECYFIKACJA

Długość fali	1927nm
Moc lasera	15W
Dostarczanie wiązki	włókno
Rozmiar plamki	0-200um
Odległość plamki	0,1 mm-2mm
Szerokość impulsu	0,1 ms-5ms
Rozmiar skanowania	1*1 mm-20*20mm
Tryb skanowania	kolejność, środek, losowy



X-ESTETIK

X-HairOn

Laser diodowy do epilacji

Cena urządzenia 65 000 zł



X-HairOn

Skuteczny, szybki i wygodny zabieg

X-HairOn łączy zalety czterech najsukuteczniejszych długości fali do epilacji. Każda z nich działa na inne struktury mieszk włosowego. Najważniejsze obszary to bulge, cebulka i brodawka. Dzięki temu zabieg jest bardziej komfortowy, a samo urządzenie idealnie wpisuje się w potrzeby gabinetów, które chcą oferować rozwiązanie nastawione na realne efekty i nowoczesne podejście do depilacji profesjonalnej.



Skuteczność:

Energia lasera jest dostarczana w bardziej efektywny sposób.



Bezpieczeństwo:

Każda wiązka wymaga niższego poziomu energii, co zmniejsza ryzyko podrażnień.



Mniejsze odczucie bólu:

Specjalny mechanizm ogranicza dyskomfort w trakcie zabiegu.



Czas zabiegu:

Szybkie pokrycie obszaru bez żelu i znieczulenia. Szybko i komfortowo.

Inteligentny ekran Android

15,6-calowy wyświetlacz 4K HD z automatycznym systemem obsługi.



Połączony ekran

Głowica współpracuje z ekranem w sposób inteligentny. Dotykowy panel na głowicy pozwala szybko zmieniać parametry, co ułatwia pracę i przyspiesza obsługę.

X-HairOn

4 długości fali dają możliwość dopasowania zabiegu epilacji do każdego fototypu skóry.

755nm

755 nm: polecane jest do jasnej skóry i cienkich włosów. Sprawdza się też przy usuwaniu pozostałych, opornych włosków w końcowych etapach terapii.

Ta długość fali działa płycej, dzięki czemu skutecznie trafia w bulgę mieszką włosowego. Jest szczególnie dobra przy włosach osadzonych powierzchownie, na przykład w okolicy brwi czy nad górną wargą.

808nm


808 nm: Polecana do wszystkich fototypów skóry (I–V), szczególnie u pacjentów z dużą gęstością włosów i przy pierwszych zabiegach.

940nm

910 nm: Ta długość fali wnika głębiej, dzięki czemu jest odpowiednia do depilacji głębszych mieszków włosowych.

1064nm

1064 nm: Polecana do ciemnych fototypów skóry (IV–VI) oraz skóry opalanej. Długa fala pozwala na głębokie dotarcie do mieszką włosowego, trafiając w cebulkę i brodawkę. Sprawdza się również przy włosach osadzonych głęboko, np. na owłosionej skórze głowy, pod pachami czy w okolicach bikini.

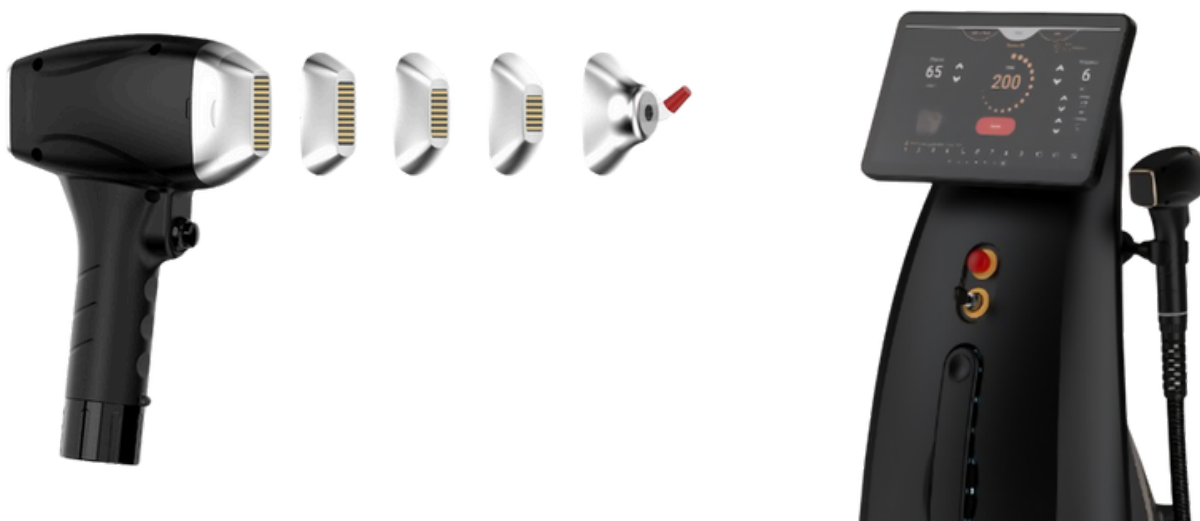

X-HairOn

Inteligentny system chłodzenia

Nowoczesny system chłodzenia: głowica została ulepszona z podwójnego chłodzenia do obiegu 360°, a temperatura może spaść nawet do -15°C w kilka sekund. Idealna depilacja bez bólu, na najwyższym poziomie komfortu.



1,5 razy większa wydajność: urządzenie może pracować przez 72 godziny non-stop, zapewniając stabilną pracę w wymagających gabinetach i salonach.



Wyjątkowa wydajność dzięki niemieckim modułom laserowym DILAS.



X-HairOn

Specyfikacja techniczna

Typ lasera:	Długości fal: 755 / 808 / 940 / 1064 nm
Wyświetlacz:	15,6-calowy dotykowy ekran True Color
Impulsy głowicy:	80 - 100 milionów impulsów
System chłodzenia:	Powietrze + woda + podwójny układ TEC + pierścieniowa płytki chłodząca
Rozmiar plamki:	12×36 mm, 12×25 mm, 15×15 mm, średnica 6 mm opcjonalnie
Zasilanie:	AC 220/110 V, 50/60 Hz
Moc lasera:	2400 W



**Efekt lodowego
chłodzenia**



Wszystkie typy skóry



**80 - 100 milionów
strzałów**



**4 wysoko skuteczne
długości fal**



Bezpieczny i bezbolesny



Różne rozmiary plamki



**Trwała redukcja
owłosienia**



**Dostosowany do kobiet
i mężczyzn**


DepiMax™


DIODOWY LASER DO EPILACJI


Cena urządzenia 55 000 zł



 **1200W**
WYSOKA MOC

 Szybkie efekty
Trwała Epilacja

 Dla każdego
typu skóry

 Komfort &
Bezpieczeństwo

X-ESTETIK

DepiMax™

4-wiązkowy laser diodowy do epilacji

Laser DepiMax™ to urządzenie zaprojektowane z myślą o intensywnej pracy w salonach kosmetycznych. Łączy wysoką moc z nowoczesną technologią lasera diodowego, co pozwala wykonywać skuteczne zabiegi usuwania owłosienia na różnych typach skóry.

Dzięki stabilnym parametrom pracy oraz dużej wydajności urządzenie sprawdza się zarówno przy małych, jak i dużych obszarach zabiegowych.

Funkcjonalna głowica i wymienne końcówki

Urządzenie wyposażone jest w trzy wymienne głowice zabiegowe:

- \varnothing 5 mm – końcówka donosowa
- 12 × 12 mm – do standardowych zabiegów
- 12 × 24 mm – do dużych partii ciała

Takie rozwiązanie pozwala dopasować zabieg do różnych obszarów oraz zwiększyć efektywność pracy.

Obsługa odbywa się za pomocą intuicyjnego ekranu dotykowego, który umożliwia szybkie ustawienie parametrów.

Wysoka moc i efektywność zabiegów


Moc 1200W pozwala na skuteczne działanie na mieszki włosowe na różnych głębokościach skóry.

Większa powierzchnia plamki zabiegowej umożliwia szybsze opracowanie dużych obszarów, co znacząco skraca czas zabiegu.

Zastosowane komponenty laserowe zapewniają stabilną pracę oraz długą żywotność urządzenia.

3 wymienne końcówki zabiegowe dopasowane do różnych partii ciała

Intuicyjny ekran dotykowy – łatwa obsługa

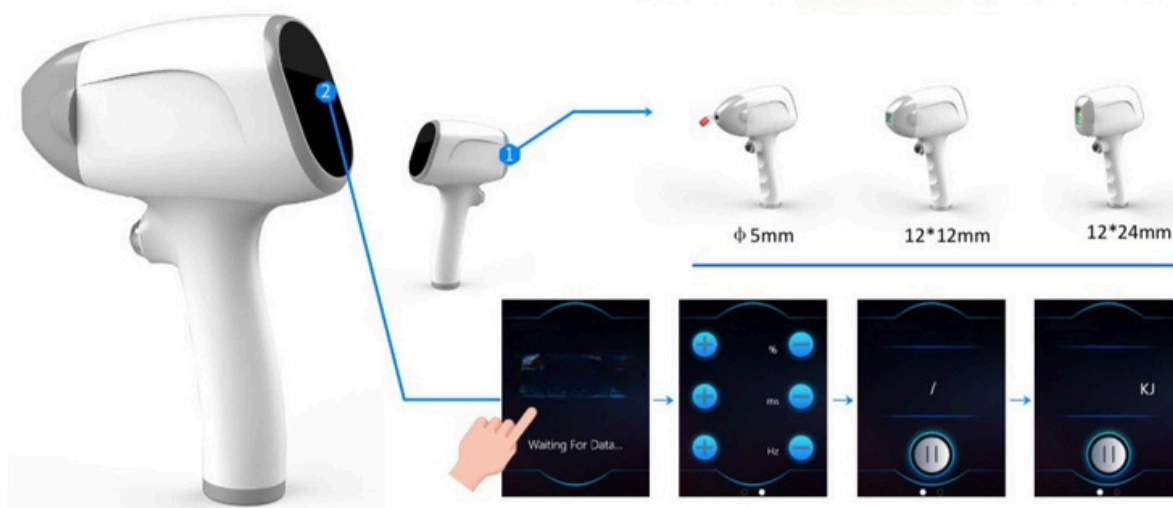

DepiMax™

System pracy oparty na różnych długościach fal

Każda długość fali odpowiada za działanie na innej głębokości skóry:


755 nm – przeznaczona do włosów jaśniejszych i cieńszych

808 nm – standardowa długość do większości zabiegów

940 nm – wspiera bezpieczeństwo pracy na różnych fototypach

1064 nm – działa na głębiej osadzone włosy

Zastosowanie kilku długości fal zwiększa zakres zabiegowy oraz skuteczność epilacji.

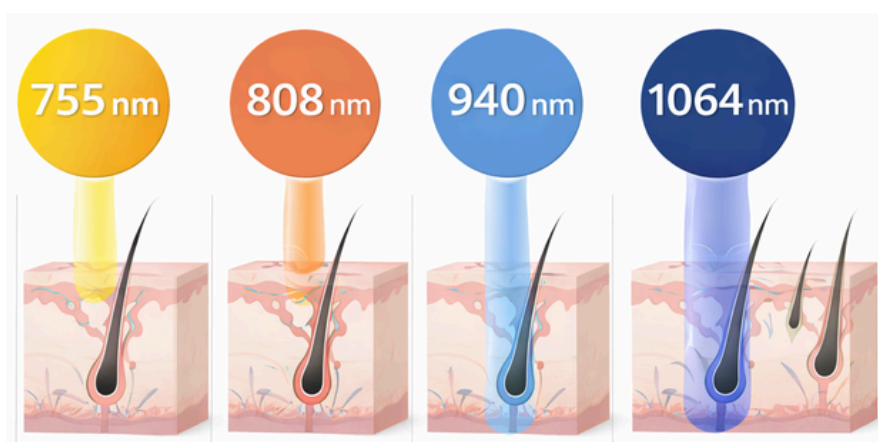

Zaawansowany system chłodzenia

Urządzenie wykorzystuje wielopoziomowy system chłodzenia:

- chłodzenie półprzewodnikowe (TEC)
- chłodzenie kontaktowe (szafirowe)

Dodatkowo układ wspierany jest przez obieg wody i powietrza, co zapewnia stabilną pracę urządzenia i skuteczne odprowadzanie ciepła.


Takie rozwiązanie ogranicza nagrzewanie skóry i zwiększa komfort podczas zabiegu.



DepiMax™

**Większa plamka zabiegowa,
wyższa efektywność pracy**

Precyzyjna głowica zabiegowa FOCUSLIGHT

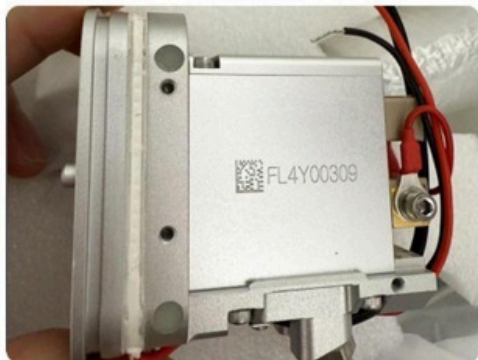

12 mm x 24 mm



Zastosowana głowica laserowa została zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy w gabinecie. Wysokiej jakości komponenty zapewniają stabilność parametrów oraz długą żywotność systemu. Plamka zabiegowa o rozmiarze 12 × 24 mm pozwala na szybkie opracowanie większych obszarów ciała, co znacząco skraca czas wykonywania zabiegów.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji głowicy energia lasera jest równomiernie rozprowadzana, co zwiększa skuteczność zabiegów i komfort pracy operatora.

Funkcjonalność i możliwości pracy:


- wysoka moc wyjściowa 1200W
- możliwość pracy na różnych fototypach skóry (I–VI)
- skuteczne działanie przy różnych kolorach włosów
- system filtrów poprawiający jakość wody
- najwyższej jakości diody laserowe FOCUSLIGHT
- podwójny system chłodzenia: TEC/półprzewodnikowy + kontaktowe chłodzenie szafirowe, zapewniający bezbolesne i komfortowe doświadczenie zabiegowe

Urządzenie zostało zaprojektowane do intensywnej pracy w gabinetach kosmetycznych.

Laser DepiMax™ został zweryfikowany pod kątem zgodności ze standardami FDA oraz TÜV Medical.

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc wyjściowa:	1200W
Typ lasera:	Laser diodowy
Rozmiar plamki:	Ø 5 mm, 12×12 mm, 12×24 mm (opcjonalnie)
Częstotliwość:	1 Hz ~ 10 Hz
Gęstość energii (fluencja):	0 ~ 120 J/cm²
Czas trwania impulsu:	10 ms ~ 200 ms
Intensywność lasera:	5% ~ 100%
System pracy:	System 808 nm lub opcjonalnie 755+808+940+1064 nm
System chłodzenia:	Woda + powietrze + szafir + TEC/półprzewodnikowe chłodzenie
Napięcie:	220V / 110V, 50 / 60 Hz



X-FRAXEL PRO Laser Ablacyjny


Cena urządzenia 70 000 zł




X-FRAXEL PRO Laser Ablacyjny

Zasada działania

Wiązka lasera CO₂ podgrzewa i odparowuje tkankę skórną, natychmiastowo usuwając powierzchniową warstwę naskórka. Każdy mikropunkt tworzy strefę termiczną, a nienaruszone komórki wokół obszaru zabiegowego wspierają proces gojenia. Dzięki temu następuje regeneracja komórek, a skóra ulega natychmiastowemu napięciu. Widoczną poprawę kondycji skóry można zaobserwować już około tydzień po zabiegu.

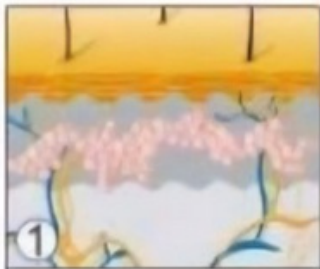


Skóra z problemem przed zabiegiem

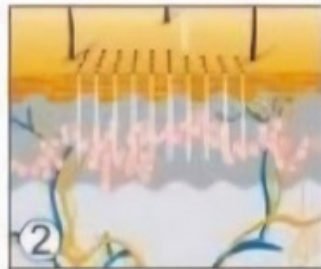

Laser frakcyjny w działaniu




Tworzone są tysiące mikrostref termicznych, które aktywują odnowę powierzchni skóry

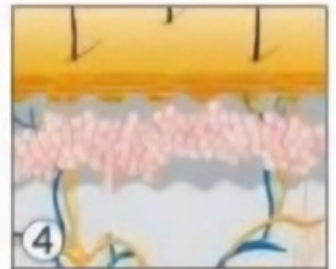

Podczas samoodnowiania skóry produkowany jest większy poziom kolagenu.


Laser dostarcza do skóry wiele wiązek o długości fali 10 600 nm, które przy pomocy skanowania frakcyjnego tworzą w naskórku liczne mikrostrefy termiczne. Każdy punkt lasera, składający się z pojedynczego lub kilku impulsów o wysokiej energii, penetruje w głąb skóry właściwej, tworząc stożkowaty otwór. Powoduje to odparowanie tkanki, koagulację oraz nasycenie biologiczne, jednocześnie uszczelniając drobne naczynia krwionośne i zmniejszając krwawienie.

Wysokoenergetyczny laser stymuluje również proliferację i reorganizację włókien kolagenowych. Skurcz stożkowych mikrootworów napina skórę, poprawiając jej gęstość, jasność, gładkość, delikatność i elastyczność.

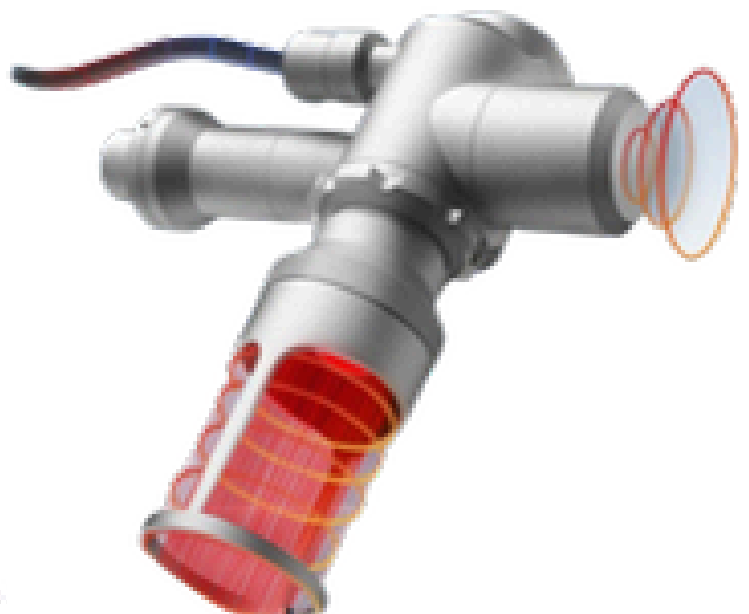


X-FRAXEL PRO Laser Ablacyjny

Metalowa tuba RF
Krótki czas regeneracji
Długa żywotność urządzenia: 7-10 lat
Chłodzenie powietrzem: brak potrzeby dodatkowej konserwacji
Jednolita energia: każda mikrostrefa otrzymuje taką samą dawkę energii

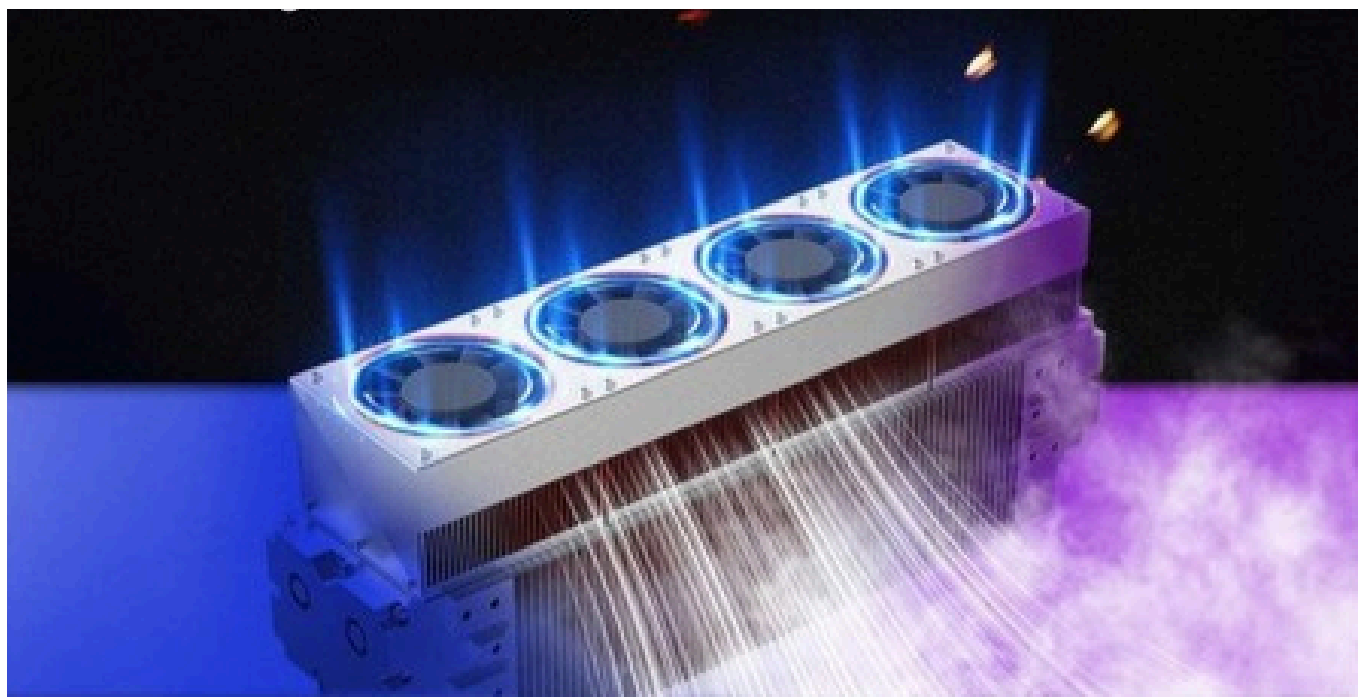

7 trybów skanowania
Różne kształty oraz regulowany rozmiar i gęstość mikrostref

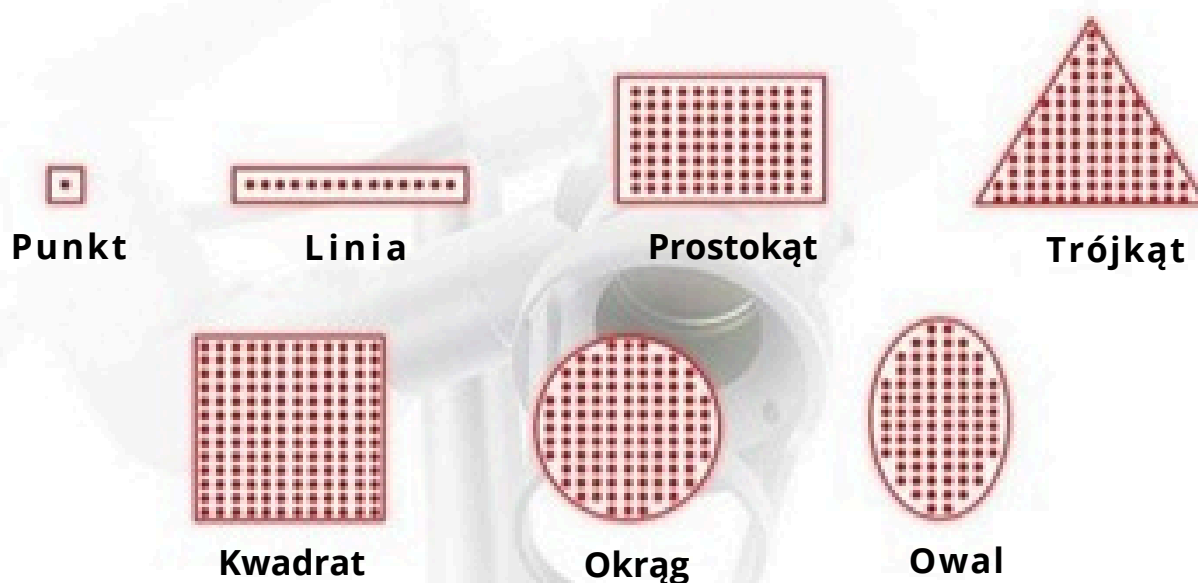

Dobór strefy gojenia dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta


X-FRAXEL PRO Laser Ablacyjny

Główce zabiegowe



Skaner


f=50mm: wiązka silnie skupiona, precyzyjne działanie, większa głębokość penetracji. Idealna do zabiegów na twarz i drobnych obszarach wymagających dokładności.

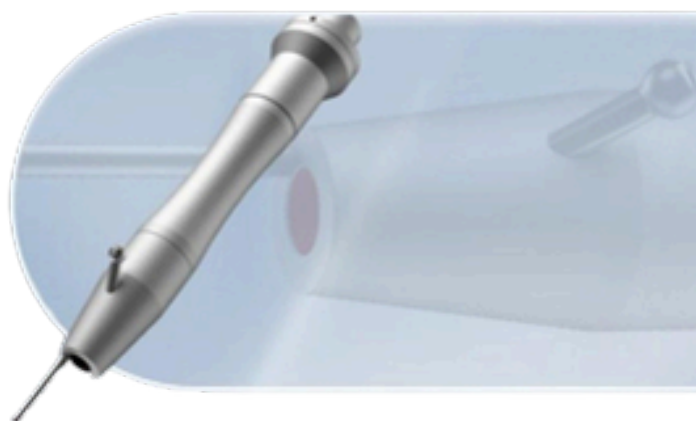

f=75mm: kompromis między precyzją, a powierzchnią działania. Nadaje się do większych partii twarzy i mniejszych obszarów ciała.



f=100mm: wiązka bardziej rozproszona, obejmuje większy obszar, płytsze działanie. Doskonała do zabiegów na ciało i miejsc wymagających szybkiego pokrycia skóry.

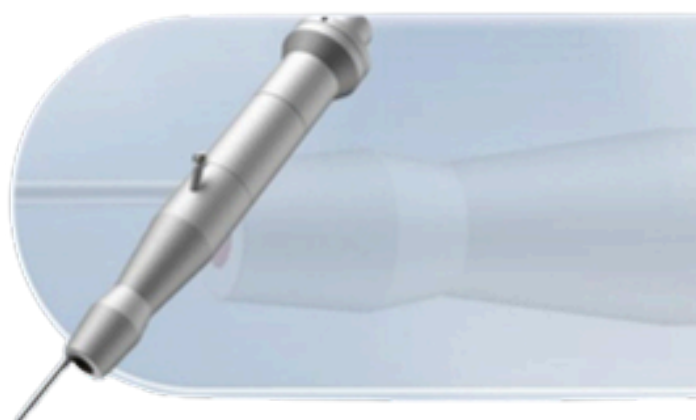

X-FRAXEL PRO Laser Ablacyjny

Zastosowanie lasera frakcyjnego CO₂:

Drobne linie i zmarszczki

Rozstępy

Plamy starcze

Blizny potrądzikowe

Skóra uszkodzona przez słońce

Blizny po zabiegach chirurgicznych

Duże pory



Odmłodzenie skóry

Blizny

Dyschromia

Fotostarzenie się skóry

Znamię

Brodawki

Specyfikacja

Fraxel Pro

Laser ablacyjny CO₂



Typ lasera:	Laser ablacyjny CO ₂ 10 600 nm
Moc wyjściowa:	1-30W; 0.6~1050 mJ
Średnica plamki ostrości:	≤0.4mm
Wiązka sygnalizacyjna:	Laser z czerwoną diodą (650nm, ≤5mW)
System transmisji:	7-przegubowe ramię sprężynowe
System oddymiania:	Wbudowany przepływ powietrza
System chłodzenia:	Chłodzenie powietrzem
Temperatura otoczenia:	5°C~40°C
Wilgotność względna:	≤80%
Zasilacz:	~220V±22V, 50Hz+1Hz
Wymiar:	695mm x 550mm x 1325mm
Waga:	55kg

X-FRAXEL Laser Ablacyjny

Cena urządzenia 35000 zł
Cena wynajmu długoterminowego od
2200 zł miesięcznie



X-FRAXEL Laser Ablacyjny

Laser Co2 wykorzystuje wiązkę laserową o długości 10600 nm z 7 rodzajami skanowania dla różnych obszarów skóry. Wykorzystywany w usuwaniu trądziku, usuwaniu blizn i innych zabiegach rewitalizacji skóry.

Laser frakcyjny CO2 ablacyjny z metalową tubą RF o długości fali 10600 nm to wysokiej klasy urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów w obrębie twarzy i ciała. Zastosowanie lasera frakcyjnego CO 2 idealnie sprawdzi się w zabiegach odmładzających skórę, redukujących zmarszczki, blizny potrądzikowe, oraz rozstępy.

Zabieg laserem frakcyjnym polega na dokonywaniu niewielkich, kontrolowanych uszkodzeń do poziomu skóry właściwej. Obszar ciała, poddawany zabiegowi jest naświetlany wiązką lasera, w efekcie promieniowania tkanki odparowują i koagulują, powodując silne pobudzenie procesów odpowiedzialnych za odbudowę skóry.

Laser frakcyjny CO2 jest zaawansowanym osiągnięciem techniki laserowej stosowanej w dermatologii.

Wskazania:

Likwidacja blizn: potrądzikowe, pourazowe, powypadkowe, pooperacyjne i po oparzeniowe

Likwidacja wiotkości skóry / poprawa napięcia tkanek

Korekta rozstępów / usuwanie rozstępów

Odmładzanie skóry twarzy

Przebarwienia

Rozszerzone pory

Likwidacja zmarszczek

Lifting powiek



Zalecane jest stosowanie kremów ochronnych z wysokim filtrem SPF 50+ przez co najmniej 30 dni po zabiegu. Przez 5-7 dni po zabiegu należy unikać alkoholu, sauny, gorących kąpielii. Proces gojenia po zabiegu laserem frakcyjnym CO₂ wynosi 7-14 dni, co stanowi przełom w zabiegach z użyciem lasera CO₂. Poprawa jakości skóry może być widoczna już po kilku dniach od zabiegu.








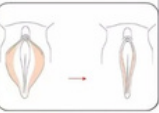
7 skanowanych kształtów

Regulowany rozmiar i gęstość



- Strefa uzdrawiania dobierana jest do potrzeb każdego pacjenta

Typ lasera	CO ₂ laser
Moc	60W
Długość fali	10600nm
Grafiki skanowania	Koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat, sześciokąt, linia prosta
Tryb wyjściowy	Ciągły, pojedynczy, pulsacyjny, super pulsacyjny
Czas trwania	0.1-10ms
Zakres skanowania	0.1mm-20mm
Dystans	0.2-2.6mm
Interwał	0-5s
Transmisja optyczna	Ramię światłowodu 6-stawowe
System chłodzenia	Zamknięte wewnętrzne chłodzenie wodne

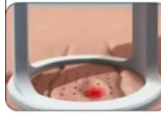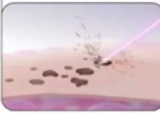Frakcyjna CO₂  Odmładzanie skóry Zabieg akcentujący Usuwanie piegów	Głowica tnąca  Usuwanie znamion Leczenie rozstępów Zastosowanie w cięciu medycznym	Zwężenie pochwy  Zmniejszanie pochwy Upiększanie pochwy Wilgotna pochwa Pielęgnacja pochwy	Labioplastyka  Kształtowanie i upiększanie warg sromowych Upiększanie otoczki
			
Przeguby importowane z Korei Południowej	Ramię 7-stawowe z obrotem do 360°	Każdy kąt leczenia można dostosować	

Dane techniczne:

Głowice:

skanująca

do cięcia

ginekologiczna

Wskazania:

odmładzanie skóry

wygładzanie zmarszczek

redukcja blizn

zwiotczenie skóry

resurfacing,

rozszerzone pory,

rozstępy,

niejednolity odcień skóry

szorstka skóra, wyrównanie nierówności skóry

X-ESTETIK

Laser Naczyniowy X-V980

Cena urządzenia 22500 zł
Cena wynajmu długoterminowego od
1500 zł miesięcznie

980 NM LASER DIODOWY

Do usuwania czerwonych
naczyń krwionośnych



Zalety stosowania lasera do usuwania naczynek V-980:

- **Precyzyjna aplikacja:** Dzięki małej głowicy, laser umożliwia dokładne zabiegi na twarzy i ciele, eliminując pajączki i naczynka.
- **Szybkie rezultaty:** Skuteczność zabiegów gwarantuje zadowolenie pacjentów.
- **Bezpieczeństwo:** Procedury z niskim ryzykiem powikłań i krótkim czasem rekonwalescencji.
- **Intuicyjna obsługa:** Duży, dotykowy ekran oraz prosty interfejs ułatwiają pracę.
- **Nielimitowana ilość strzałów.**

Dlaczego warto kupić laser do usuwania naczynek V-980:

- **Technologia na najwyższym poziomie:** Laser wykorzystuje długość fali 980 nm, co gwarantuje skuteczność zabiegów.
- **Wszechstronność:** Może być używany w różnych miejscach na ciele, zarówno w małych, jak i dużych obszarach.
- **Mobilność:** Kompaktowe rozmiary i lekka konstrukcja ułatwiają transport i użytkowanie w różnych lokalizacjach.

Inwestując w laser do usuwania naczynek v-980, zapewnisz swoim pacjentom nowoczesne i skuteczne rozwiązania problemów naczyniowych, podnosząc standardy świadczonych usług w zakresie medycyny estetycznej.



Laser X-V980 do zamykania naczynek - zastosowanie

- **Teleangiektazje:** Małe, czerwone naczynka na twarzy, często występujące na policzkach i nosie, nogach. Zabiegi skutecznie usuwają naczynka o maksymalnej średnicy do 1,5 mm.
- **Rubiniaki (zmiany rubinowe):** Małe, czerwone lub purpurowe naczyniaki krwionośne, które mogą być usuwane laserowo.
- **Naczyniaki** są jednym ze wskazań do zastosowania laserowego usuwania przy użyciu lasera o długości fali 980 nm. Laser ten jest efektywnym narzędziem w terapii naczyniaków dzięki swojej zdolności do głębokiej penetracji tkanki i selektywnej absorpcji przez hemoglobinę, co pozwala na celowanie w patologiczne naczynia krwionośne bez znacznego uszkodzenia otaczającej tkanki zdrowej. Laser 980 może być stosowany zarówno do leczenia naczyniaków płaskich, truskawkowych, jak i jamistych, zapewniając efektywne i minimalne inwazyjne rozwiązanie dla pacjentów poszukujących terapii estetycznej i medycznej. Ta metoda jest szczególnie cenna ze względu na swoje zalety, takie jak krótki czas rekonwalescencji, minimalne ryzyko powikłań oraz dobre wyniki estetyczne, co czyni ją popularnym wyborem wśród specjalistów dermatologii i kosmetologii estetycznej.

Specyfikacja techniczna:

- **Typ lasera:** diodowy 980 nm
- **Moc urządzenia:** 100W
- **Moc diody lasera:** 50W
- **Chłodzenie:** powietrze
- **Częstotliwość impulsu:** 1~20 Hz
- **Wielkość plamki:** 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 2mm, 3mm
- **Czas trwania impulsu:** 20ms-100ms
- **Opóźnienie impulsu:** 180ms-900ms
- **Wyświetlacz:** 17" dotykowy kolorowy
- **Zasilanie:** AC 100-240 V 50/60 Hz
- **Rozmiar urządzenia:** 40cmx32cmx35(H)
- **Certyfikaty:** CE, Deklaracja Zgodności

EMC Directive: EN 60601-1-2:2015+A1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A1:2021

Safety Directive: EN 60601-

1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014+A2:2021



Laser Q-SWITCH X-BOSS

Cena urządzenia 27000 zł
Cena wynajmu długoterminowego od
2000 zł miesięcznie



Laser Q-SWITCH X-Boss Pro™

Ultra nowoczesny laser do usuwania tatuaży i peelingu węglowego

✓ **4 wiązki laserowe:**

532 nm: Idealna do usuwania kolorowych tatuaży i redukcji powierzchniowych przebarwień,

755 nm: Do rewitalizacji skóry, rozjaśniania piegów i niwelowania oznak starzenia,

1064 nm: Głęboko penetrująca, stosowana do ciemnych barwników i tatuaży,

1320nm: do laserowego peelingu węglowego,

- ✓ Usuwanie tatuaży wszystkich kolorów,
- ✓ Niwelowanie przebarwień postępczych i hormonalnych,
- ✓ Usuwanie makijażu permanentnego,
- ✓ Zmniejszanie blizn i rozstępów,
- ✓ Rewitalizacja skóry,
- ✓ Funkcja chłodzenia,
- ✓ Certyfikat bezpieczeństwa CE.
- ✓ System ANDROID
- ✓ Świetna efektywność zabiegów
- ✓ Automatyczny system chłodzenia skóry bezpośrednio z głowicy



X-ESTETIK



PARAMETRY TECHNICZNE

Wyświetlacz	13,3" Kolorowy ekran dotykowy LCD
Pasek laserowy	Średnica 5mm
Rozmiar plamki	2-5mm
Główce zabiegowe	1064nm/532nm/1320nm/755nm
Gęstość energii	10-2000mJ/cm ²
Częstotliwość impulsów	1-10Hz
Woltaż	110V/220V
Moc chłodzenia	15 W
Temperatura chłodzenia	5 stopni Celsjusza



X-ESTETIK

Luméra Estetik™ DPL & NIR

Cena urządzenia 39000 zł




DPL&NIR

Wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji skóry




Luméra Estetik™

Zabieg DPL (Dynamic Pulsed Light) to nieinwazyjna, nieablacyjna procedura kosmetyczna, łącząca technologię lasera oraz intensywnego światła pulsacyjnego (IPL). Skutecznie redukuje problemy skórne takie jak melasma, ziemista i zmęczona cera, a także przebarwienia, docierając do głębszych warstw skóry. Efektem zabiegu jest jaśniejsza, bardziej promienna i wyraźnie oczyszczona skóra. Pozwól naszej zaawansowanej technologii DPL zadbać o piękno Twojej cery!

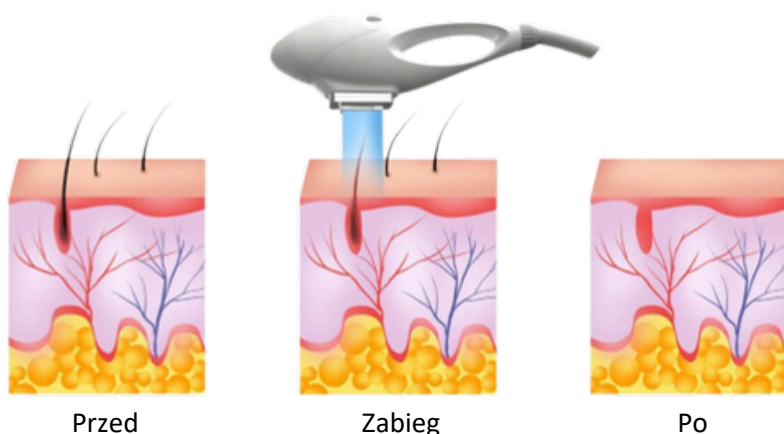


- Leczenie chorób naczyniowych, takich jak rumień twarzy i trądzik różowaty
- Poprawa stanu trądziku
- Częściowe naświetlanie (czoło, nos, okolice ust itp.)
- Niszczenie mieszków włosowych i uzyskanie efektu usuwania owłosienia
- Poprawa zmarszczek i wiotkości skóry
- Poprawa pigmentacji, takiej jak plamy, melasma i plamy starcze
- Poprawa zażółcenia i stanów zapalnych
- Naświetlanie małych obszarów (wargi, okolice oczu itp.)

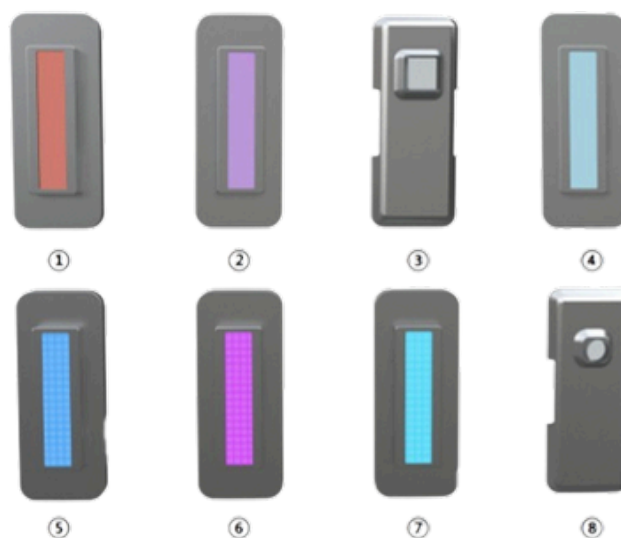


Filtry w urządzeniach DPL są wykonane z kryształów szlachetnych, które charakteryzują się wysoką przezroczystością oraz doskonałymi efektami w usuwaniu owłosienia i odmładzaniu skóry. Importowane lampy ksenonowe produkowane w Anglii zapewniają długą żywotność i doskonały transfer energii.

Dwa unikalne adaptory do miniatury punktów świetlnych umożliwiają bardziej precyzyjne leczenie małych, specyficznych obszarów. Ośmiu akcesoriów wykorzystuje technologię magnetycznej adsorpcji, co ułatwia ich zdejmowanie, czyszczenie i dezynfekcję, zapewniając bezpieczeństwo i


Luméra Estetik™

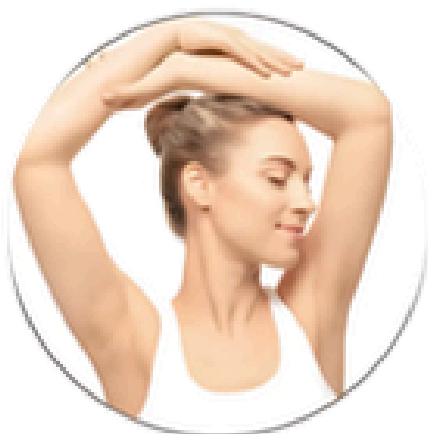


Depilacja włosów

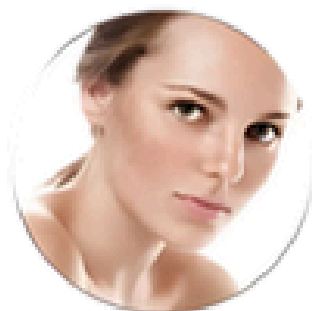

Terapia przebarwień

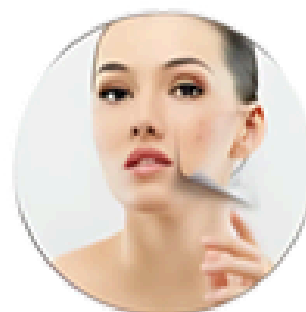


**Leczenie
trądziku**

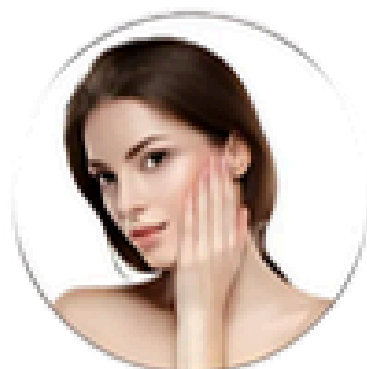

**Odmładzanie
skóry**



**Terapia
naczyniowa**

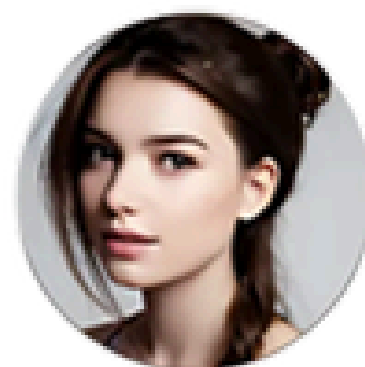

**Ujędrnianie
skóry**

Luméra Estetik™

Kluczowe cechy technologii NIR


Terapia światłem bliskiej podczerwieni (NIR) opiera się na założeniu, że światło o długiej fali stymuluje metabolizm komórkowy oraz produkcję energii. Energia podczerwieni jest niewidoczna dla oka, ale dociera głęboko do tkanek miękkich, mięśni, stawów i kości.

Trzy główne fotoreceptory pochłaniające światło w zakresie NIR to: hemoglobina, mioglobina, cytochrom c oksydaza.


Spośród nich, cytochrom c oksydaza odgrywa kluczową rolę w mechanizmie fotobiomodulacji (lub terapii światłem o niskim poziomie, LLLT), która poprawia produkcję energii komórkowej (ATP).



**Przywrócenie równowagi
nawilżenia skóry
i zatrzymanie wilgoci**

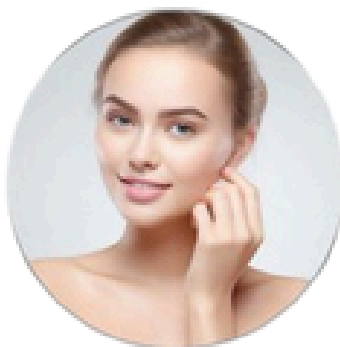

**Wyrównanie
kolorytu skóry**

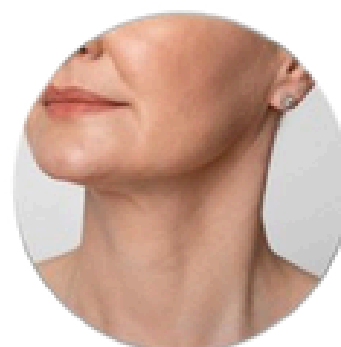

**Odświeżenie
zmęczonej skóry i
przywrócenie jej
młodszy wyglądu**



Luméra Estetik™

Komponenty	Jednostka główna + Rękojeść DPL + Rękojeść NIR + 6 filtrów magnetycznych + 2 punkty Regulatory rozmiaru
Długość fali	640-950nm, 590-950nm, 560-950nm, 530-950nm 530-650 900-1200 nm (naczyniowy) 400-600 800-1200 nm (światło komórkowe) 900-1600 nm (bliska podczerwień)
Rozmiar plamki	8* 40mm Regulator okrągły: Średnica 7 mm Regulator kwadratowy: 10mm * 10 mm
Gęstość energii DPL	1-50J/cm ²
Moc DPL	1000W
Moc NIR	500W
Filtr	Kryształy kamieni szlachetnych
Żywotność	NIR 1000h DPL 300000 strzałów
Lampa ksenonowa	Importowana z Wielkiej Brytanii
Układ chłodzenia	Chłodzenie wodne i powietrzne
Temperatura chłodzenia	-5°C
Wyświetlacz	15,6 calowy inteligentny wyświetlacz LED
Maksymalna wydajność	2000W
Woltaż	Prąd zmienny 110V/240V

X-ESTETIK

RF Mikroigłowy Estetik Frax™

Cena urządzenia 25000 zł
Cena wynajmu długoterminowego od
1500 zł miesięcznie



Estetik Frax - Profesjonalny system RF mikroigłowy z vacuum i światłem niebieskim

RF mikroigłowy Estetik Frax to zaawansowane urządzenie dla gabinetów kosmetycznych i medycyny estetycznej, które łączy w sobie dwie kluczowe funkcje:

- ◆ **Mikronakłuwanie RF z vacuum i światłem niebieskim 415 nm - główna technologia zabiegowa.**
- ◆ **Wbudowany analizator skóry - umożliwia precyzyjną diagnostykę i dobór terapii.**

Główna technologia - Mikronakłuwanie RF z vacuum i światłem niebieskim

- ◆ **Mikronakłuwanie - precyzyjne, kontrolowane nakłucia tworzą w skórze mikrokanaliki, które pobudzają naturalne procesy regeneracji i zwiększają wchłanianie składników aktywnych.**
- ◆ **Radio Frequency (RF) - fale radiowe podgrzewają głębsze warstwy skóry, stymulując fibroblasty do produkcji nowego kolagenu i elastyny. Efektem jest poprawa jędrności, napięcia i elastyczności skóry.**
- ◆ **Podciśnienie (Vacuum) - delikatne zasysanie skóry stabilizuje jej powierzchnię i zwiększa komfort zabiegu, umożliwiając jeszcze bardziej precyzyjne działanie igieł.**
- ◆ **Światło niebieskie 415 nm - działa antybakteryjnie i wspiera terapię skóry problematycznej, w tym trądzikowej, redukując nadmierne wydzielanie sebum.**


RF Mikroigłowy Estetik Frax™

- ➔ najlepsze kartridże na rynku
- ➔ fala radiowa 100 W
- ➔ wysuw igieł do 4 mm
- ➔ analizator skóry
- ➔ oprogramowanie ANDROID




RF Mikroigłowy Estetik Frax™

Bezpieczne, higieniczne i sterylne opakowanie igieł. Igieł są pakowane i oznakowane indywidualnie oraz sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Proces ten zapewnia pełną higienę, brak ryzyka zanieczyszczeń i skuteczność sterylizacji na poziomie 99,99%.

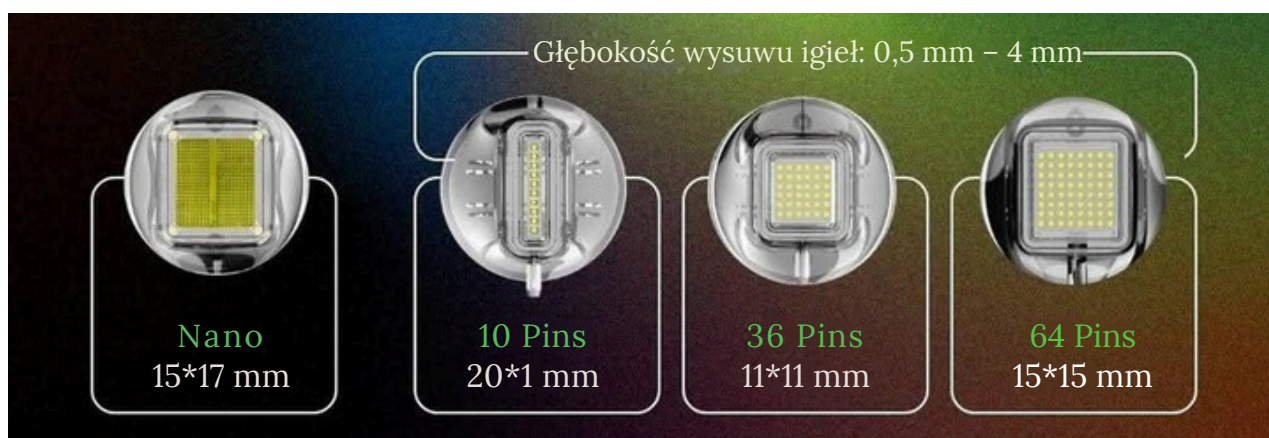

Ultracienkie mikroigły

- ◆ Minimalna średnica igły wynosi zaledwie 0,1 mm
- ◆ Mniej punktów krwawienia i niższy poziom bólu
- ◆ Niskie ryzyko infekcji w okresie pozabiegowym

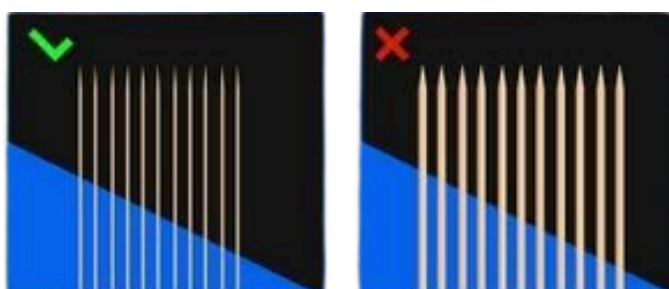



RF Mikroigłowy Estetik Frax™



Adsorpcja podciśnieniowa mikronakłuć zwiększa precyzję i bezpieczeństwo zabiegu, poprawiając skuteczność kliniczną nawet o ponad 20%.

Specjalny uchwyt do mikronakłuwania – zaprojektowany dla precyzyjnej, kontrolowanej pracy na różnych obszarach twarzy i ciała.

Urządzenie wyposażone w oprogramowanie Android z możliwością zdalnej aktualizacji OTA, które zapewnia stały dostęp do najnowszej wersji systemu i pełną aktualność funkcji.

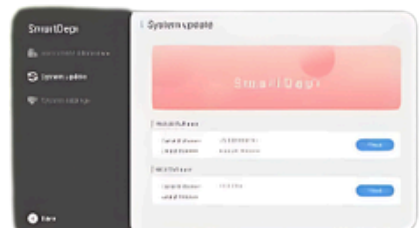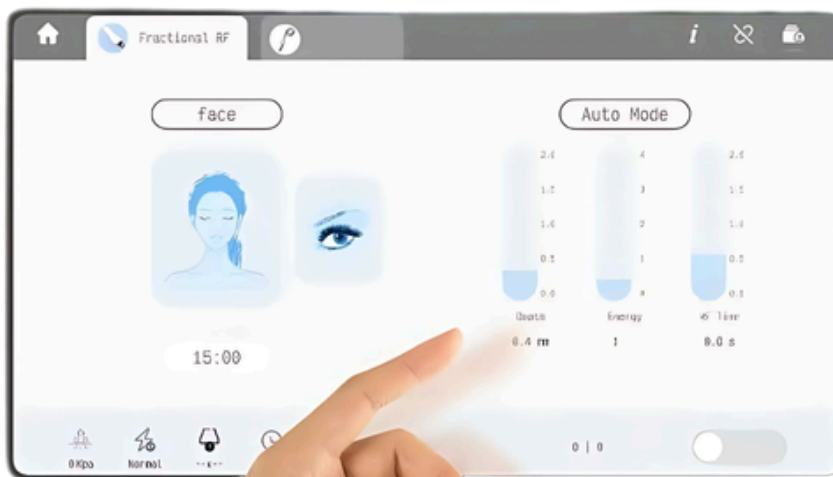

RF Mikroigłowy Estetik Frax™

Wbudowany analizator skóry – umożliwia ocenę kondycji skóry w czasie rzeczywistym i dobór indywidualnych parametrów zabiegowych. To rozwiązanie pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie terapii do potrzeb klienta.



Parametry

Ekran	13,3-calowy w pełni laminowany ekran			
Moc	100 W			
Częstotliwość	1MHz/4MHz/8MHz (8MHz dla kącików oczu, 4MHz dla policzków i szyi oraz 1MHz dla ciała)			
Napięcie wejściowe	110V/220V			
Częstotliwość wejściowa	50Hz/60Hz			
Podciśnienie próżniowe	Max. 70KPa			
Ciśnienie	30KPa, regulowane według potrzeb klienta			
Średnica mikronakłuć	0.1 mm			
Odstęp czasu między wyjęciem igły	0,5–4,0 mm (różni się w zależności od miejsca)			
Kombinacja wykresów igieł	10 * 1 10-igłowy	6*6 36-igłowy	8*8 64-igłowy	Nano
Rozmiar produktu	SmartFN 434 326 255 mm		SmartFNC 438*391 386 mm	
Rozmiar opakowania	530 620 410 mm		530 620 510 mm	
Waga produktu	10 kg		20 kg	
Waga paczki	15 kg		25 kg	



Regen Lift - fala radiowa 448 kHz

Cena urządzenia 49000 zł
Cena wynajmu długoterminowego od
3000 zł miesięcznie



Regen Lift - fala radiowa 448 kHz

Czym jest Regen Lift?

Regen Lift 448KHZ to unikalna i opatentowana częstotliwość radiowa, tzw. częstotliwość radiowa Proionic, która umożliwia przyjemne i skuteczne zabiegi upiększające twarz i ciało.

Najnowsza innowacja w aparatach Regen Lift 448 kHz to niezwykle wszechstronne nowe rozwiązanie, które pozwala na wykonanie szerokiej gamy zabiegów w jednym urządzeniu, na częstotliwości 448 kHz.

Wskazany jest do ujędrniania skóry, redukcji cellulitu, modelowania sylwetki oraz zastosowań przed i pooperacyjnych.



Podniesienie temperatury ciała do 40-50°C

Rozszerzenie tętnicy i naczyń włosowatych

Zwiększenie szybkości przepływu krwi

Wzrost kolagenu

Stymulacja układu odpornościowego

Wzrost metabolizmu

Usuwanie toksyn

Korekta twarzy

Zdrowy

Opieka nad otyłością

Zmniejsz ból

RF diathermy

CET


BIPOLAR

RET



CAP (Pojemnościowy transfer elektroniczny) o głębokości od 3 do 5 cm

Zabieg diatermii oporowej z systemem próżniowym

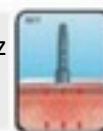


Elektroda pojemnościowa skupia terapię warstwy mięśni.

Działa na powierzchniowe tkanki o długości 3-5 cm skóry, działa ujędrniająco i przeciwstarzeniowo, pomaga przywrócić elastyczność naczyń krwionośnych, odbudować układ mikrokrążenia, dostarczyć więcej składników odżywczych dla fibroblastów, wzmocnić syntezę kolagenu, poprawić przepływ komórek reaktywnego tlenu, przywracając w ten sposób żywotność komórek i odbudowując warstwę siateczkową.

LECZENIE EFEKT


ZABIEGI NA TWARZ

Zmarszczki elastyczność powieki. szyja dekolt

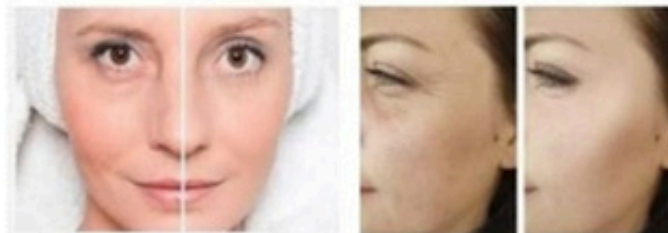

ZABIEGI NA CIAŁO

Klatka piersiowa zwiotczenie tłuszcz cellulit rozstępy. otyłość

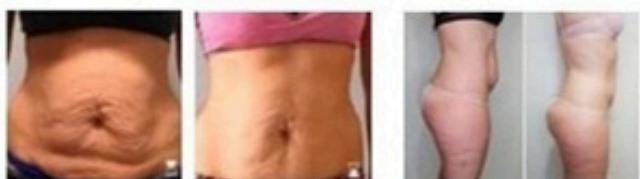

KORZYŚĆ

1 Moc wyjściowa RF jest bardziej wystarczająca, maksymalna moc wynosi 300 W, a energia rośnie szybciej.

2. Dodaj system próżniowy do swojego zabiegu. Dodaj do swojego zabiegu diatermii oporowej system próżniowy, który pomoże w leczeniu poprzez mobilizację tłuszczu i zwiększenie drenażu.

3. Dynamicznie dostosuj głębokość działania energii i automatycznie dostosuj przepływ energii, aby zapewnić najskuteczniejsze leczenie tkanki, leczenie jest bardziej kompleksowe, a efekt lepszy.

4. Zwróć uwagę na rodzaj głowicy zabiegowej, aby dostosować kształt fali wyjściowej i energię, aby moc wyjściowa była bardziej stabilna i możliwa do kontrolowania.

5. Postrzeżenie impedancji obwodu ciała w czasie rzeczywistym, dostosowując w ten sposób moc wyjściową, czyniąc doświadczenie bardziej komfortowym.

Regen Lift - fala radiowa 448 kHz

ZABIEG NA TWARZ

Do zabiegów na twarz pomaga zregenerować strukturę skóry poprzez zwiększenie syntezy kolagenu i włókien elastycznych, dzięki czemu nieustrukturyzowane tkanki zostają nawilżone i dotlenione, poprawiając tym samym jej jakość, pogrubiając skórę i nadając jej większą odporność.




- Redukcja drobnych zmarszczek
- Popraw worki pod oczami i cienie
- Odmłodzenie twarzy
- Zredukuj podwójny podbródek

Jeden kurs obejmuje 6 zabiegów. Każdy zabieg trwa około 40 minut. Przerwy 1-2 tygodnie

LECZENIE CIAŁA

W przypadku zabiegów na ciało może przywrócić równowagę wymiany jonów w komórkach i zwiększyć metabolizm, dotleniając w ten sposób tkanki i pomagając komórkom przywrócić ich naturalne funkcje. W efekcie tkanka skórna odzyskuje utraconą elastyczność, stopniowo zanika tłuszcz, zostaje przywrócone prawidłowe mikrokrążenie, a skóra zostaje odmłodzona.

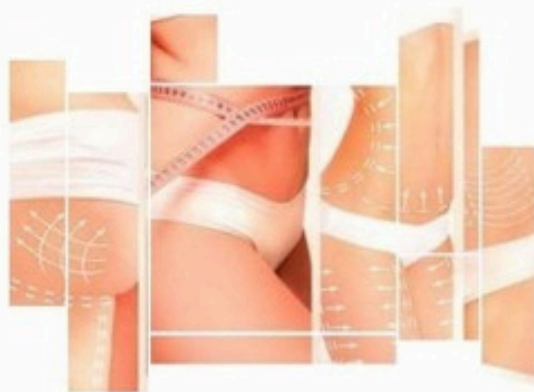

- Redukcja tkanki tłuszczowej
- Zmiana kształtu ciała
- Leczenie cellulitu i częściowa rekonstrukcja skóry.
- Zwiększa poziom kolagenu
- Napnij luźną skórę
- Rozluźnienie mięśni, złagodzenie bólu.

Regen Lift - fala radiowa 448 kHz



Ile sesji kuracji Regen Lift potrzebujemy?

W zależności od wskazań i obszarów zabiegowych może być konieczna seria 5-6 lub 8-10 sesji. Liczba sesji zostanie dostosowana do zaleceń lekarskich i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jak często można wykonywać zabiegi?

Zwykle odbywa się od 1 do 2 sesji terapeutycznych w tygodniu, ale nie ma ograniczeń. Ponieważ częstotliwość radiowa 448 kHz jest całkowicie nieszkodliwa dla organizmu ludzkiego i jego tkanek biologicznych. Częstotliwość zajęć będzie dostosowana do potrzeb pacjenta.

JAKIE SĄ MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE PRODUKOWANE PRZEZ INDEEPLUS 448 KHZ?

Nie ma żadnych skutków ubocznych, ponieważ częstotliwość radiowa Proionic® jest nieszkodliwa dla organizmu człowieka i jego tkanek biologicznych. Czasami jednak na bardzo wrażliwej skórze może wystąpić zaczerwienienie i mrowienie.

ZABIEG JEST BOLESNY?

Nie, zabieg stopniowo i równomiernie podnosi temperaturę w wybranych obszarach ciała, z poszanowaniem fizjologii komórki. Zapewnia zatem przyjemny i nieinwazyjny zabieg bez skutków ubocznych.

JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA?

- Rożrusznik serca lub inne implanty elektroniczne
- Nienałuszczonej skóry (otwarte rany lub oparzenia)
- Zakrzepowe zapalenie żył


Regen Lift - fala radiowa 448 kHz

SPECYFIKACJE

Nazwa	Regen Lift RF 448 kHz
Częstotliwość	448KHZ
Uchwyty zabiegowe	Korekta czerwona z próżnią
Moc wyjściowa	300W
Monopolarna elektroda pojemnościowa	40, 50, 60, 70mm
Monopolarna elektroda rezystancyjna	φ30, 50, 70, 80mm
Napięcie	220V 50HZ o 110V 60HZ
Wymiary maszyny	320 * 370 * 820 mm
Waga netto	15.5kg
Pakiet	560 500 980 (mm)



UCHWYT

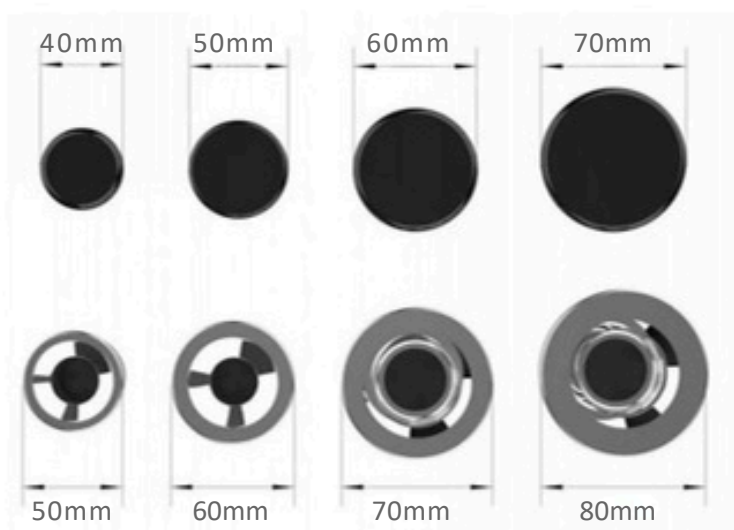

INTERFEJS



Regen Lift - fala radiowa 448 kHz



przed



po



przed




po

Regen Lift - fala radiowa 448 kHz



przed

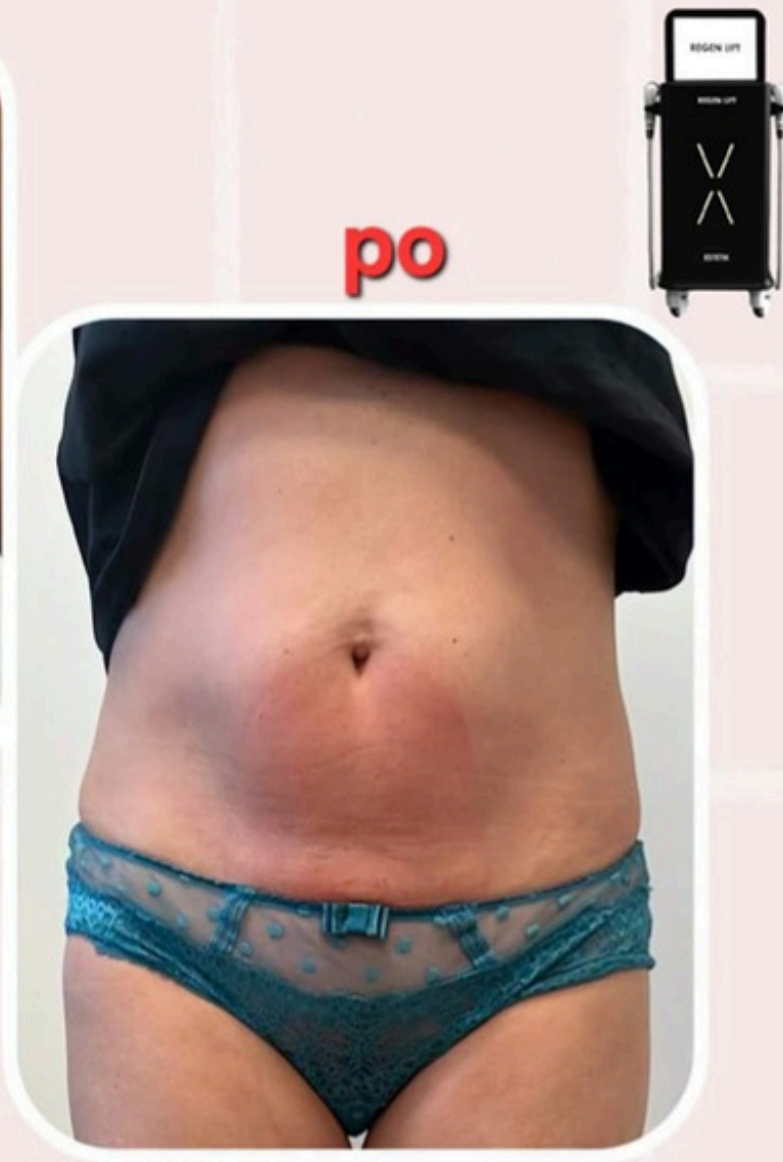

Regen Lift - fala radiowa 448 kHz



X-CONTOUR KRIO

Cena urządzenia 55000 zł



X-CONTOUR KRIO

35 minut zabiegu
30 minut padów E-CRYO
5 minut aplikatora O-Shock


Duże obszary poddane zabiegowi.
Do 8 padów działających jednocześnie

Kompleksowe cele na
tłuszcz, cellulit,
skórę i mięśnie

Idealne połączenie
mrożenia, masażu i
szoku dla tkanki
tłuszczowej

Wysoka rentowność
Najkrótszy czas i minimum
Personel zapewniający
natychmiastowe widoczne
rezultaty

Duży komfort
Zastosowanie bez użycia próżni
bez silnych krwiałków
spowodowanych odsysaniem

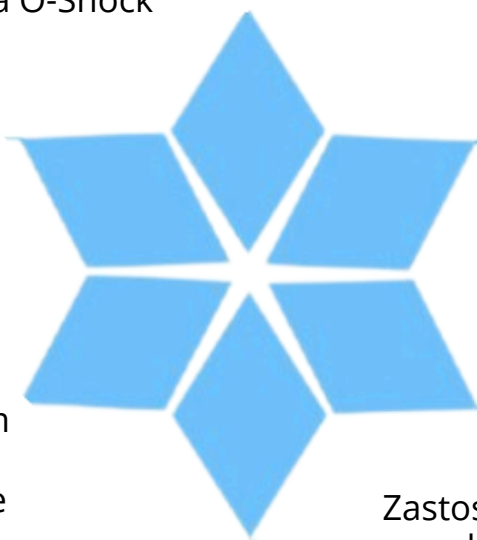

Dane techniczne:

Częstotliwość EMS: 4000Hz
Temperatura: 45°C to -10°C
X-CONTOUR KRIO Pad: 8 sztuk
Kształt fali: 3 rodzaje

X-CONTOUR KRIO

Kriolipoliza bezpróżniowa

Kriolipoliza to wyjątkowa, nieinwazyjna metoda selektywnej redukcji komórek tłuszczowych poprzez kontrolowane, miejscowe chłodzenie. Proces krystalizacji zamrażania tłuszczu powoduje, że komórki tłuszczowe ulegają apoptozie. Zabieg bez użycia próżni zapewnia doskonały i komfortowy zabieg chłodzący bez obrzęków, siniaków i wiotkości skóry. poprzez zasysanie z kubka próżniowego do kriolipolizy

Elektroporacja

System elektroporacji oferuje biostymulację za pomocą impulsów elektrycznych, imituje bioelektryczny proces organizmu, aby stworzyć skurcze mięśni, zwiększenie krążenia krwi, poprawa metabolizmu w trakcie zabiegu kriolipolizy. Ujędrnij ciało i pozbyć się niechcianych centymetrów, jednocześnie wyraźnie poprawiając definicję mięśni w ciągu 30 minut.



Fale L przenikają do skóry, rozkładając zanieczyszczenia w skórze, przyspieszając prędkość aktualizacji komórki, stymuluje prędkość przepływu płynu



M-Wave stymuluje skurcze mięśni i ruchy bierne, podnosząc, napinając i modelując zwiotczałą skórę



Z-Wave delikatnie stymuluje, aby rozluźnić zmęczone mięśnie, pomagając w pielęgnacji układu limfatycznego

Osiem padów X-CONTOUR KRIO łączy się z bezpróżniową kriolipolizą i elektroporacją, które są idealnie skoordynowane ze sobą, dostarczając stałą energię chłodzącą i stymulację bioelektryczną niechcianej tkanki tłuszczowej na dużych obszarach odpowiedni obszar.

Unikalna konstrukcja radialna zapewnia doskonały kontakt z leczonym obszarem i doskonały transport chłodu do komórki tłuszczu podskórnego.

Zabieg X-CONTOUR KRIO wykonywany jest przy użyciu 8 nakładek niezależnie lub jednocześnie, co pozwala na rozległe zastosowania w wielu obszarach ciała.



NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA

Unikalne 3D zaawansowane technologicznie podejście

✓ Kriolipoliza

✓ Elektroporacja

ContourPADY EMS

3 razy szybsze rezultaty

3 razy bardziej skuteczne

Do 6,8 CM redukcji obwodu

Od 40% do 60% redukcji tłuszczu na zabieg

X-CONTOUR KRIO



X-ESTETIK

X-SHAPE

Cena urządzenia 50000 zł



X-Shape

X-Shape to innowacyjny system do modelowania i ujędrniania ciała. Jego nowoczesny design i synergicznie działanie systemu kontroli zassania próżniowego, masażu rolkami, fali radiowej, kawitacji i podczerwieni-to cechy wyróżniające X-Shape, ponadto, czyni go urządzeniem dużo bardziej skutecznym, niż tradycyjny masaż próżniowy. X-Shape to 5 technologii:

RF - stymuluje syntezę kollagenu i elastyny przez fibroblasty, skraca włókna kolagenowe, dając efekt liftingu, upłynnia tłuszcz z adipocytów. Wspomaga krążenie krwi i metabolizm komórek tłuszczowych. Podwyższona temperatura wywołuje efekt lipolizy - rozbija tkankę tłuszczową przyczyniając się do redukcji cellulitu.

Kawitacja ultradźwiękowa - uszkodza ściany komórek tłuszczowych i pomaga metabolizować uwolniony tłuszcz. Zastosowana technologia pozwala na wywołanie w tkankach efektu kawitacji, generując mikroskopijne „bąbelki” które następnie implodują (zapadają się). Siła, która towarzyszy temu zjawisku powoduje rozerwanie ściany komórkowej adipocytów.


Podciśnienie - wspomaga rozpad tkanki tłuszczowej przez mechaniczny ucisk adipocytów, korzystanie wpływa na ukrwienie skóry.

Masaż rolkami - działanie drenujące, wspomagające przepływ złożeń oraz toksyn do układu wydalniczego. Następuje stymulacja tkanki łącznej oraz jest przywracane krążenie żyłne i limfatyczne.

Zalety zabiegu na urządzeniu X-Shape, to przede wszystkim komfort pracy, brak okresu rekonwalescencji, skuteczne modelowanie ciała (mieralne i utrzymujące się rezultaty, redukcja cellulitu i wzrost napięcia skóry, w krótkim czasie, możliwość modelowania owalu twarzy. Dodatkowo jest stosowana do wzmocnienia tkanki łącznej oraz usuwania z organizmu toksyn i zbędnych produktów przemiany materii oraz pobudzenia fibroblastów do produkcji kollagenu i elastyny. X-Shape można także wykorzystywać do rozluźnienia mięśni, a także drenażu limfatycznego. Bezpośrednim efektem zabiegu jest uaktywnienie układu żylnego i limfatycznego zmniejszając tym samym obrzęki i zatrzymywanie wody w organizmie.



X-Shape

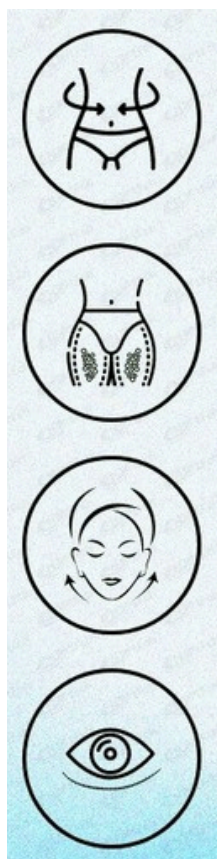

Konturowanie ciała

Usuwanie cellulitu

Ujędrnianie skóry

Znikający ciemny krąg



Obszar zabiegu: brzuch

**Obszar zabiegu: plecy, brzuch,
pośladki**

**Obszar zabiegu: klatka
piersiowa,plecy, brzuch,
pośladki, nogi, ramiona**

Obszar zabiegu: twarz oczy szyja



X-Shape

Dane połączenia elektronicznego	
Napięcie sieciowe	110/220VAC +10% (patrz etykieta systemu)
Kategoria systemu	50/60 Hz
Rodzaje ochrony przed porażeniem prądem	Sprzęt klasy I
Stopień ochrony przed porażeniem prądem	Bez
Stopień ochrony przed szkodliwym wnikaniem wody	Zwykły sprzęt
Warunki klimacyjne (podczas pracy)	
Temperatura otoczenia	15°C do 39°C
Wilgotność względna	30% do 80%
Ciśnienie atmosferyczne	86,0 kpa do 106,0 kpa
Warunki klimatyczne (podczas transportu i przechowywania)	
Temperatura otoczenia	-20°C - 60°C
Wilgotność względna	≤ 93% bez kondensacji
Ciśnienie atmosferyczne	86,0 kpa - 106,0 kpa
Długość / Szerokość / Wysokość / Waga	420 mm / 400 mm / 1140 mm / 60 kg

EMS FormaX

Cena urządzenia 55000 zł



EMS FormaX

Położ się i trenuj mięśnie bez wysiłku i pocenia się.

Elektromagnetyczna redukcja tłuszczu oraz trening skurczów mięśni.

Trenuje: mięśnie poprzeczne, proste i skośne brzucha oraz pośladki.

Podkreśla naturalne krągłości.


Unosi pośladki i modeluje brzuch, tworząc ładny kontur mięśni.




Po 30 minutach leżenia jak po 5 godzinach cardio

Wykorzystanie wysokoenergetycznych, skupionych fal elektromagnetycznych pozwala pacjentom modelować sylwetkę bez operacji, osiągając widoczne efekty. Warto podkreślić, że jest to urządzenie kosmetyczne nieinwazyjne i bezniekcyjne, które przede wszystkim stymuluje i kurczy mięśnie, spala tkankę tłuszczową i redukuje ją. Można je stosować na brzuch, pośladki, ramiona, łydki i uda.


Technologia wysokoenergetycznych, skupionych fal elektromagnetycznych działa w ten sposób, że prąd przepływa przez specjalną cewkę w urządzeniu, tworząc regulowane pole magnetyczne w impulsach, które stymuluje neurony ruchowe w wybranym obszarze. W efekcie mięśnie kurczą się dziesiątki tysięcy razy, wywołując delikatne drżenie.

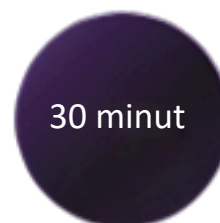

2000 skurczów mięśni

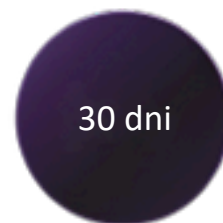

Modelowanie mięśni brzucha

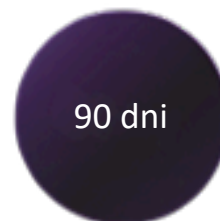

Modelowanie sylwetki

EMS FormaX



Cztery zalety

Brak promieniowania jonizującego.
Nie zmienia struktury komórek ani cząsteczek.

Brak uszkodzeń nerwów czuciowych
Stymulowane są wyłącznie zakończenia nerwów ruchowych.

Brak efektu cieplnego
Technologia oparta na impulsach elektromagnetycznych nie wytwarza ciepła.

Bez promieniowania
Zabieg jest całkowicie bezpieczny dla organizmu.

Jak działa urządzenie?

Mocne maksymalne skurcze mięśni
Stymulują reakcję mięśni, nieustannie przekształcając ich wewnętrzną strukturę, co zwiększa gęstość i objętość mięśni.

Jedno urządzenie - trzy efekty

Modelowanie sylwetki

Wysmuklenie talii

Uniesienie i ujędrnienie pośladków

Spontaniczne skurcze, a spalanie tłuszczu

Skurcze mięśni zwiększają zapotrzebowanie na energię w komórkach tłuszczowych. Wydzielona adrenalina wysyła sygnał do rozpoczęcia lipolizy – procesu rozkładu tłuszczu.

Kaskadowy efekt spalania tłuszczu

Mocne, maksymalne skurcze mięśni powodują uwolnienie adrenaliny, co wywołuje efekt kaskadowy prowadzący do intensywnej lipolizy komórek tłuszczowych.


Usuwanie martwych komórek tłuszczowych

Wolne kwasy tłuszczowe (FFA) powodują zaburzenia funkcjonowania komórek i indukują apoptozę – zaprogramowaną śmierć komórki. Martwe komórki rozpadają się i są naturalnie usuwane z organizmu.

EMS FormaX


„Hiper-skurcz mięśni” powoduje apoptozę komórek tłuszczowych

Proces wygląda tak, że wydzielone katecholaminy uruchamiają lipolizę, powodując nagły wzrost wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) w komórkach tłuszczowych. Nadmiar FFA wywołuje stres retikulum endoplazmatycznego, który prowadzi do zaprogramowanej śmierci komórki – apoptozy.

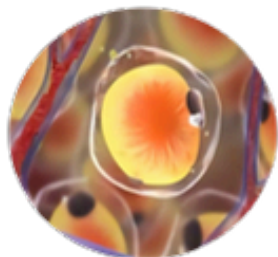


Eulipoliza

Trójglicerydy w komórkach tłuszczowych rozkładają się na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe (FFA), które są transportowane jako źródło energii. Proces stymulowany jest przez katecholaminy uwalniane podczas skurczów mięśni.

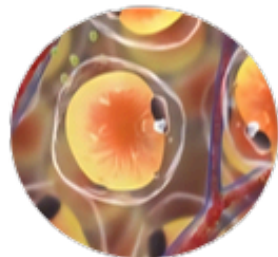

Wybuch wolnych kwasów tłuszczowych (FFA)

Podczas hiper-skurczu mięśni katecholaminy uwalniane są szybko i intensywnie. Wolne kwasy tłuszczowe wytworzone w trakcie lipolizy nie mogą być całkowicie usunięte z komórek tłuszczowych, co prowadzi do ich nagromadzenia.

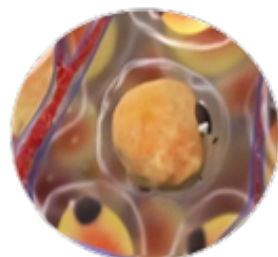


Apoptoza komórek tłuszczowych

Nagromadzenie wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) w komórkach tłuszczowych przekracza ich tolerancję, wywołując stres retikulum endoplazmatycznego (ER stress). W efekcie komórki tłuszczowe ulegają apoptozie i naturalnie się rozkładają.

Trening HIFEM „hiper-skurcz mięśni” vs zwykły trening mięśni

Technologia magnetoplastyczna wykorzystuje HIFEM – wysokoenergetyczne, skupione pole elektromagnetyczne. Podczas jednego 30-minutowego zabiegu impulsy energii wywołują nawet 20 000 skurczów mięśni. Tak intensywnych „hiper-skurczów” nie da się osiągnąć podczas żadnego tradycyjnego treningu!

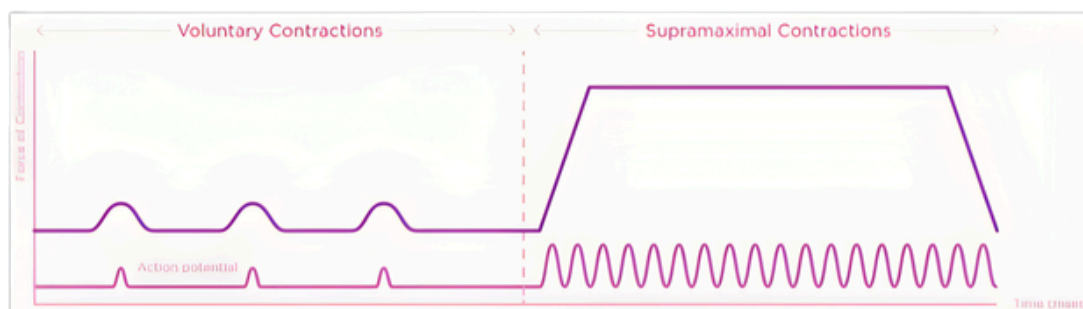

EMS FormaX

Rewolucyjna technologia „HIFEM” – wysokoenergetyczne, skupione pole magnetyczne

Działa na mięśnie i tłuszcz – skuteczna penetracja do 8 cm

Technologia HIFEM wywołuje „hiper-skurcze mięśni”, dając efekty treningowe, których nie osiągniesz podczas zwykłych ćwiczeń fitness.

Impulsy HIFEM selektywnie stymulują neurony ruchowe, nie wpływając na skórę. „Hiper-skurcz mięśni” pobudza przyspieszony metabolizm komórek tłuszczowych, prowadząc do ich rozkładu.


Przyspieszony metabolizm wywołuje zaburzenia funkcjonowania komórek tłuszczowych, które następnie wchodzi w proces apoptozy. Równocześnie mięśnie są wzmacniane i rosną, dzięki czemu „budowa mięśni + spalanie tłuszczu” odbywa się w jednym kroku.



Technologia HIFEM wywołuje hiper-skurcze mięśni, dając efekty treningowe, których nie da się osiągnąć podczas tradycyjnych ćwiczeń.



Technologia HIFEM znacząco przebudowuje tkankę mięśniową, zwiększając jej gęstość, siłę i objętość już po kilku zabiegach.

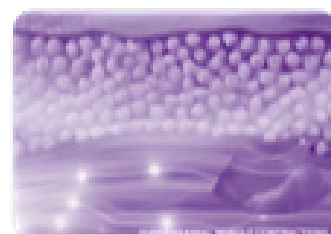


Objętość włókien mięśniowych zwiększa się, co prowadzi do wyraźnego wzmocnienia i ujędrnienia mięśni.



EMS FormaX

Magnetoplastic vs. elektrostymulator

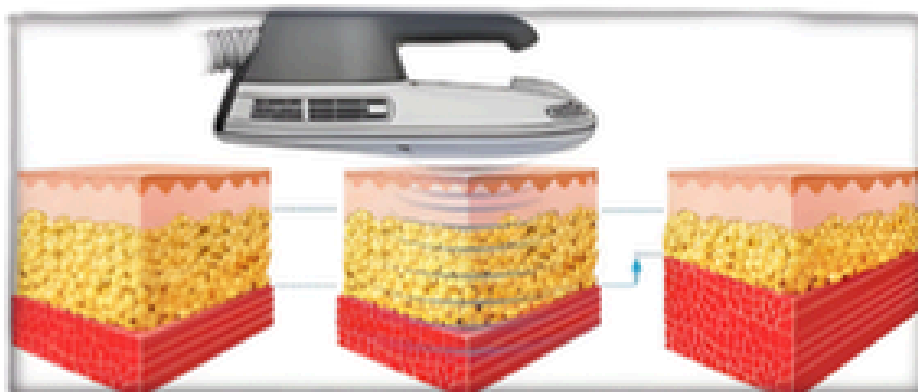


Magnetoplastic

Technologia HIFEM skutecznie stymuluje całą sieć neuronów ruchowych, penetrując mięśnie na głębokość do 8 cm.

Rozgałęzienia nerwowe wywołują skurcz całego mięśnia.

Efekt apoptozy komórek tłuszczowych i „hiper-skurczu mięśni” działa jak trwały, intensywny trening fizyczny – jest poza zasięgiem tradycyjnych metod.

Badania w Stanach Zjednoczonych pokazują najlepsze efekty już po 4 zabiegach, a doświadczenie pacjentów jest bardzo pozytywne.

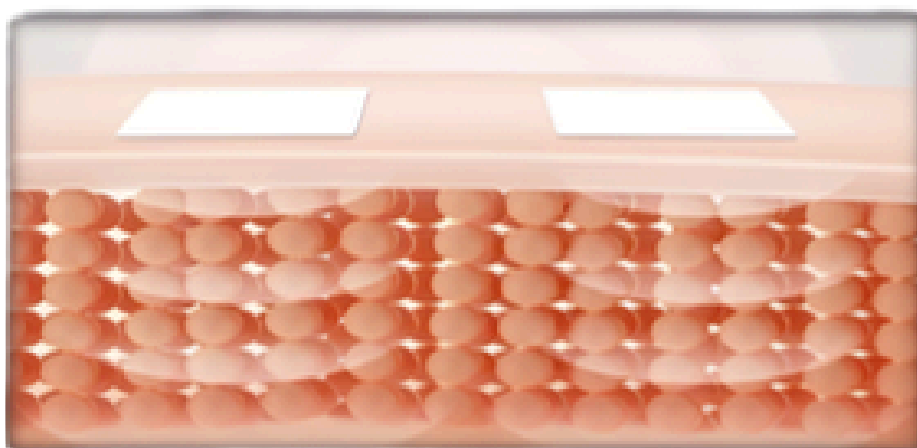

Elektrostymulator


Większość energii prądu skupiona jest na powierzchni skóry, a tylko niewielka część dociera do mięśni.

Pacjent odczuwa lekkie mrowienie lub skurcze mięśni.


Aby uzyskać widoczne efekty, potrzeba około 40 zabiegów.

Nie można zwiększyć intensywności, ze względu na ból i ryzyko poparzeń.



EMS FormaX

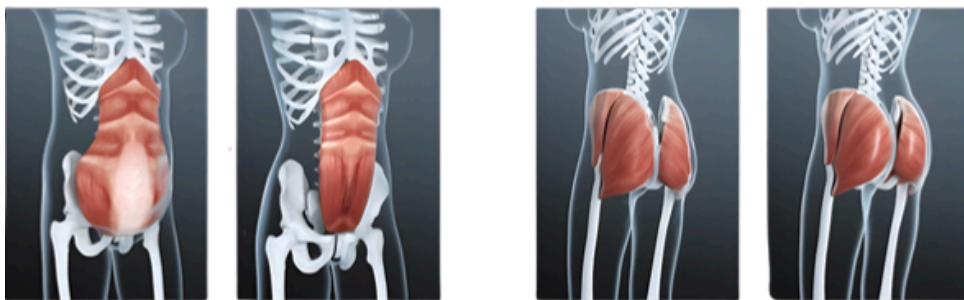

Efekty widoczne gołym okiem

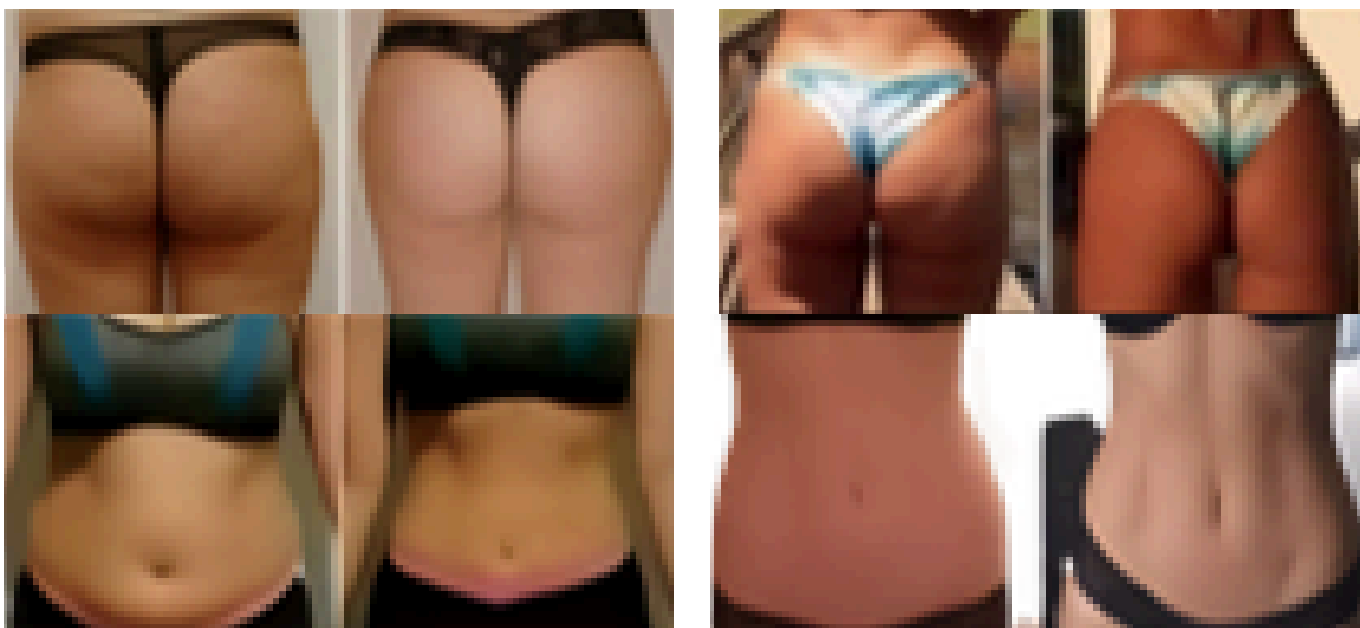

Widoczne efekty po kilku zabiegach EMS FormaX. Zmiana wagi około $\pm 2,25$ kg – sylwetka wyraźnie bardziej napięta i wymodelowana.

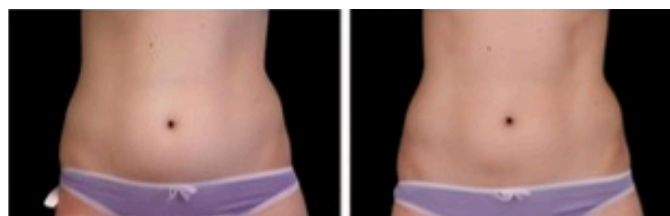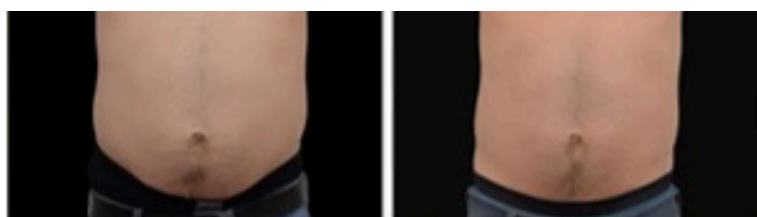



Modelowanie sylwetki – nowy sposób na efekty bez siłowni

Treningi fitness często zniechęcają wiele osób ze względu na ich intensywność i konieczność długotrwałej regularności. Osiągnięcie idealnie zarysowanego brzucha czy uniesionych pośladków wymaga miesięcy pracy i wyrzeczeń.

Nowoczesne technologie, takie jak EMS FormaX, stają się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych ćwiczeń. Urządzenie pozwala klientom uzyskać efekty podobne do intensywnego treningu – bez wysiłku i potu. Dla salonów kosmetycznych to szansa na poszerzenie oferty o zabiegi, które realnie konkurują z efektami siłowni i przyciągają nowych klientów szukających szybszych rezultatów.

Grupy przeciwwskazań:

- 1. Uszkodzona skóra lub rany – unikać miejsc zranionych**
- 2. Osoby z chorobami serca (np. nieregularne bicie serca), w szczególności z rozrusznikiem serca**
- 3. Pacjenci onkologiczni**
- 4. Osoby z chorobami zakaźnymi**
- 5. Kobiety w ciąży, karmiące lub w trakcie miesiączki**
- 6. Pacjenci po poważnych operacjach lub z cukrzycą**
- 7. Obecność jakichkolwiek metalowych elementów w ciele**
- 8. Osoby z chorobami naczyń mózgowych (np. po udarze)**

**Parametry urządzenia:**

Technologia sterowania: HIFEM

Natężenie pola: 16 Tesla

Ekran: 15,6-calowy ekran dotykowy

Moc wyjściowa: 8500 W

Napięcie zasilania: 110/220 V

Wymiary całkowite: 430 mm × 468 mm × 1339 mm

X-Blue Pen

Cena urządzenia 5500 zł

Cena kartridża 39 zł

Cena wynajmu długoterminowego od
500 zł miesięcznie



X-Blue Pen

Urządzenie do mikroigłowego nakłuwania

Cechy produktu :

- szybkość: możliwość wytworzenia w skórze nawet 1920 kanałów na sekundę
- głębokość nakłuć do 2,5 mm
- brak możliwości wystąpienia zakażenia krzyżowego dzięki systemowi zarządzania zanieczyszczeniami i sterylnej, jednorazowej pokrywie
- podwójny tryb pracy (przez ładowarkę lub baterie)
- intuicyjny ekran dotykowy
- ergonomiczna konstrukcja

Wysoka
częstotliwość
przenika
podstawę
mięśnia

Podwójna absorpcja
składnika aktywnego



ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Zmniejszona grubość, aby
dopasować się do dotyku



WYŚWIETLACZ CYFROWY

Moc przekładni jest
wyraźnie widoczna



GŁOWICA WYMIENNA

Bezpieczniejsze i
bardziej higieniczne



DŁUGI CZAS PRACY BATERII

Dłuższy czas użytkowania i
łatwiejsza obsługa



X-Blue Pen

Kartridż:

- materiał igły: stal nierdzewna klasy chirurgicznej
- jednorazowy kartridż wyposażony w 16 sterylnych igieł
- precyzja – igła wchodzi w skórę prostopadle
- igły nie drapią i nie ciągną skóry, zapobiegając powstaniu skaleczeń i ran



Bagnet śrubowy

Parametry

Nazwa produktu: Nanometrowe elektryczne urządzenie mikroigłowe

Zakres stosowania: twarz, ciało

Poziom energii: 3 poziomy regulowany

Pojemność baterii: 800mA 2pcs

Kolor: srebrny

Rozmiar paczki: 27X13X10CM

Długość igieł: 0.25-2.0mm

Waga: 1220g

Igły 16 pinowe



Biopen Q2

Cena urządzenia 800 zł

Cena kartridża 35 zł



Cena wynajmu długoterminowego od
150 zł miesięcznie

biopen® | Q2

EMS

MIS

LED

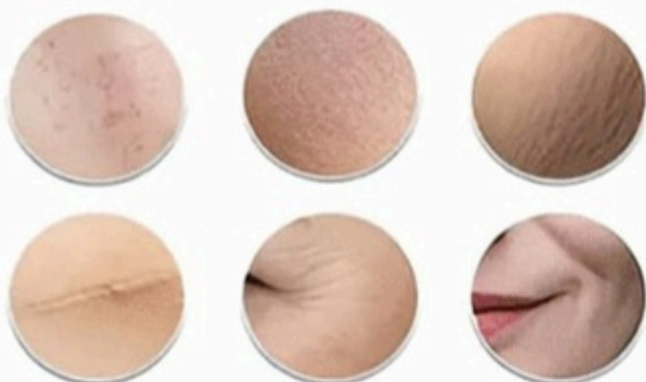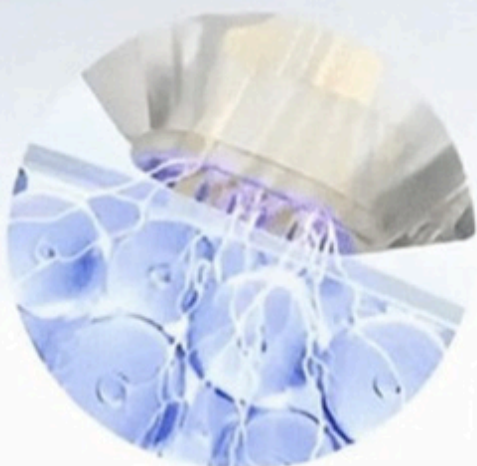

Bio Pen Q2

Co to jest Bio Pen Q2?

To zaawansowane urządzenie łączące trzy potężne technologie upiększające: mikronakłuwanie, elektroporację EMS oraz światło LED, stworzone z myślą o zapewnieniu najlepszych efektów mikronakłuć dla miłośników pielęgnacji skóry. To wszechstronne urządzenie oferuje potrójne działanie odmładzające, dostarczając efektów rewitalizujących skórę jak nigdy dotąd.

Kluczowe korzyści z użycia Bio Pen Q2:

- Poprawa Tekstury Skóry - mikronakłucia ulepszają teksturę skóry, promując gładką i równomierną cerę,
- Zredukowane Zmarszczki - stymulacja produkcji kolagenu pomaga zmniejszyć zmarszczki i drobne linie, przywracając młodzieńczy blask,
- Wzmocnienie Jędrności - elektroporacja EMS poprawia elastyczność skóry, dając jej bardziej ujędrniony i napięty wygląd,
- Zmniejszenie Rozmiaru Porów - urządzenie spiera regenerację skóry, efektywnie redukując rozmiar porów,
- Zredukowane Stany Zapalne - światło
- LED łagodzi zaczerwienienia i stany zapalne, co jest idealne dla wrażliwej lub podrażnionej skóry,
- Przyspieszone Gojenie - światło LED wspomaga szybsze gojenie ran, redukuje blizny potrądzikowe i inne niedoskonałości

Kluczowe funkcje Bio Pen Q2:

- Potrójne Działanie Odmładzające - wykorzystuje moc mikronakłuwania, elektroporacji EMS i światła LED do kompleksowego odmładzania skóry,
- Unikalna Technologia Mikronakłuwania Dr. Pen - precyzyjne igły stymulują produkcję kolagenu, promują elastyczność skóry i redukują zmarszczki,
- Elektroporacja EMS o 3 Poziomach - zapewnia stabilną energię, poprawiając teksturę i jędrność skóry,
- Światło LED Czerwone i Niebieskie - wykorzystuje określone długości fal światła do leczenia różnych problemów skórnych,
- Przyjazny dla Użytkownika Design - automatycznie przestaje działać, gdy jest umieszczony na stacji zasilającej i wznowia pracę po jej podniesieniu.



Opakowanie:

- Urządzenie Bio Pen Q2
- 2 szt. kartridży 25 igłowych,
- Stacja zasilająca,
- Kabel,
- Instrukcja,

biopen Q2



25-biegunowa elektroporacja impulsów EMS*

Stabilna i średnia energia,
Trójwymiarowa stymulacja komórek

Elektroporacja EMS mikroigłami
Stymuluje komórki i przyspiesza
syntezę kolagenu



Pole energetyczne mikroprądów EMS
Pomysłowe ułożenie dodatnich i ujemnych
biegunów pozwalają każdej sąsiedniej igle
tworzyć niezliczoną ilość kombinacji form
sieciovych, tworząc w ten sposób gęste
mikroprądowe pole energetyczne

25-biegunowa pulsacyjna elektroporacja EMS to 25 niezależnych igieł rozmieszczonych w pomysłowy sposób tak, aby uzupełniać prąd szybko i równomiernie przesyłają prąd.

nie jest tak, że odżywka do włosów nie działa,
ale Twoja metoda wtlaczania substancji
aktywnych jest nieodpowiednia

Pożegnaj tradycyjne metody pielęgnacji skóry.

EMS stymuluje komórki do produkcji ATP,
dostarczając więcej energii do wzrostu
włosów jednocześnie wzmacniając cebulki
włosów.

Twórz mikrokanaly i dostarczaj włosom
substancje aktywne bezpośrednio do
głębokich warstwy w celu zwiększenia
efektywności ich absorpcji.

Zwiększa absorpcję

Wzmacnia włosy i zapobiega
ich wypadaniu

Skraca okres wypadania
mieszka włosowego



TRADYCYJNA APLIKACJA ODŻYWKI



MIKROIGŁY EMS

Specyfikacja techniczna:

- Zakres regulacji igły: 0-1,5 mm,
- 5 regulowanych poziomów prędkości (do 16 000 obr/min),
- Inteligentny dotykowy ekran LED,
- Migający wskaźnik stanu baterii,
- Wbudowana akumulatorowa bateria,
- Bezpieczne, skuteczne, oszczędne i nieinwazyjne zabiegi,
- Brak trwałych uszkodzeń czy urazów,
- Możliwość zastosowania do prawie wszystkich typów skóry,
- Zagęszcza skórę właściwą bez uszkodzania,
- Gwarancja: 1 rok,

bio pen[®] | Q2

Auto MTS Electroporation

EMS

MTS

LED



X-Derma

Cena urządzenia 15000 zł



Czysta skóra.

X-Derma.

Myślałaś, że w pełni wykorzystujesz zalety zabiegów oczyszczania skóry? No cóż, zastanów się jeszcze raz.

X-Derma, niezwykle mocny roztwór hydradermabrazji, który pozwala dokładnie oczyścić, nawilżyć i odżywić skórę twarzy pacjenta. Wprowadzając standardy najwyższej jakości i innowacyjne podejście X-Derma, działa głęboko, ale delikatnie, aby oczyścić i odmłodzić skórę, pozostawiając ją świeżą, czystą i pięknie nawilżoną.

X-Derma to znakomity samodzielny zabieg, a także niezbędny preparat do wstępnego leczenia, stosowany do przygotowania skóry do różnych zabiegów odmładzających. Oferuje również niesamowite rezultaty jako wstępny zabieg do różnych zabiegów skórnych.


Droga do oczyszczenia
właśnie stała się o wiele
jaśniejsza.



Oczyszczanie skóry w najlepszym wydaniu!

Badania wykazały, że zanieczyszczenia, toksyny i substancje chemiczne w środowisko miejskie może uszkodzić skórę, podczas gdy rozległe stosowanie kosmetyków w erze selfie powoduje również zatykanie i starzenie się skóry. X-Derma ma rozwiązanie. Platforma działa w 3-etapowym procesie, łącząc najwyższą jakość wyznaczonych rozwiązań na każdym kroku. Unikalne 360° platformy - obrotowa końcówka i silne działanie ssące umożliwiają głębokie oczyszczanie i ekstrakcję zanieczyszczeń, zapewniając jednocześnie wysoką, skuteczną przenikliwość roztworów do skóry. Końcówka działa w ruchu okrężnym, zapewniając lepsze i jednorodne pokrycie, co prowadzi do dokładniejszego procesu oczyszczania. Wykonane z elastycznego materiału silikonowego, końcówka jest miękka i przyjemna dla skóry pacjenta.

X-Derma jednocześnie oczyszcza, łagodzi i nawilża, dostarczając skórze silnych składników odżywczych i pozostawiając ją czystą, nawilżoną oraz odświeżoną. To niezwykle skuteczny zabieg, który wzbogaca i rozszerza ofertę Twojej kliniki, umożliwiając Ci zmaksymalizowanie potencjału swojego biznesu z łatwością.

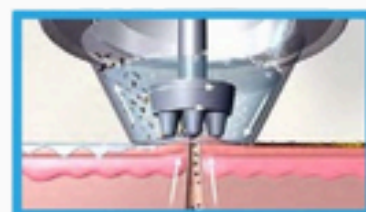

360°

Zabieg X-Derma: 3 kroki i rozwiązania

01

Ekstrakt i klarowanie

Martwe komórki naskórka są usuwane w celu przygotowania powierzchni do ekstrakcji. Dokładna ekstrakcja pozostawia skórę czystą i świeżą, jednocześnie odsłaniając zdrową powierzchnię skóry.

X-Derma EXFO – W tym kroku stosuje się rozpuszczalny w wodzie peeling, roztwór zawierający kwas alfa-hydroksylowy (AHA) jest stosowany w celu efektywnego usuwania martwej komórki naskórka.

02

Wyłucz i oczyść

Głębokie czyszczenie ssące usuwa brud i zanieczyszczenia z głębi skóry, pozostawiając ją czystą i optymalną do skutecznego wchłaniania roztworów.


X-Derma CLEANSE - W tym kroku stosuje się roztwór tłuszczu, rozpuszczalny kwas salicylowy (BHA). Działa głęboko, usuwając brud i zanieczyszczenia z wnętrza skóry, nie powodując podrażnień.

03

Kondycjonowanie i nawilżanie

Roztwór odżywczy jest dostarczany za pomocą obracającej się końcówki, zapewniając optymalną penetrację skóry. To rozwiązanie chroni i nawilża, przygotowuje skórę do kolejnych zabiegów.

X-Derma HYDRATE - Aby dokończyć zabieg, w tym etapie stosuje się odżywcze serum Hydro Essence, zapewniając wysoce skoncentrowany poziom odżywczego nawilżenia i ochronne przeciwutleniacze w czystej skórze.

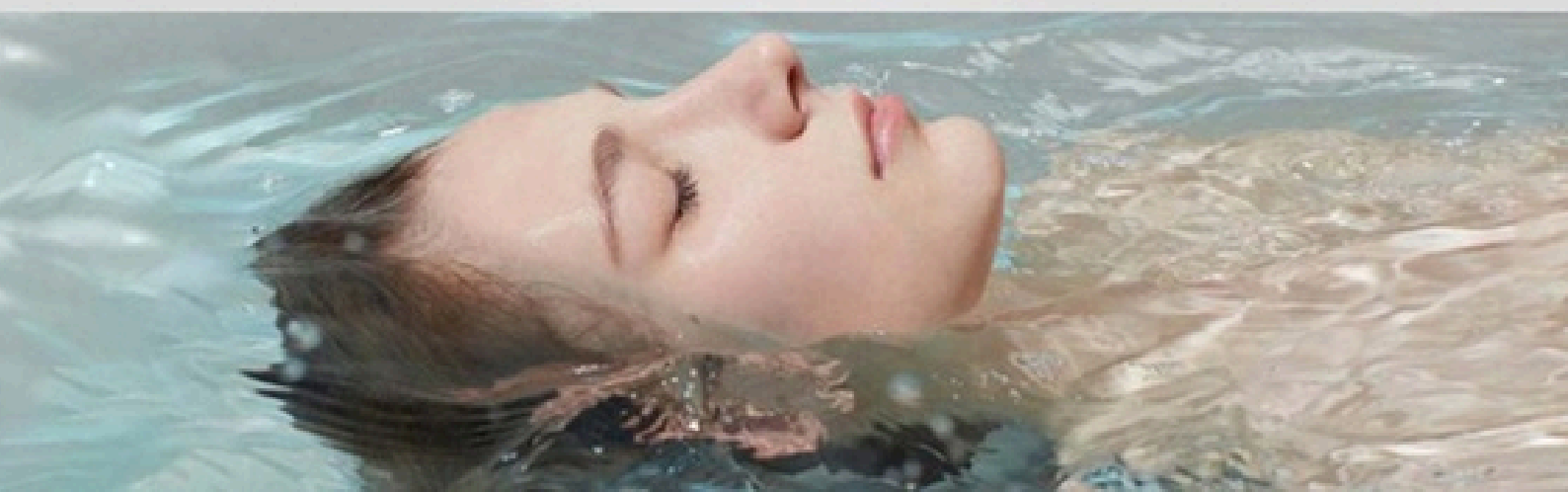


Mezo Blask


To innowacyjny system terapeutyczny, który w sposób nieinwazyjny i bezdotykowy transportuje kwas hialuronowy i substancje aktywne do najgłębszych warstw skóry.




W aplikatorze nośnik wzbogacony kwasem hialuronowym i substancjami aktywnymi, połączony z czystym tlenem, tworzą mikrojednostki.

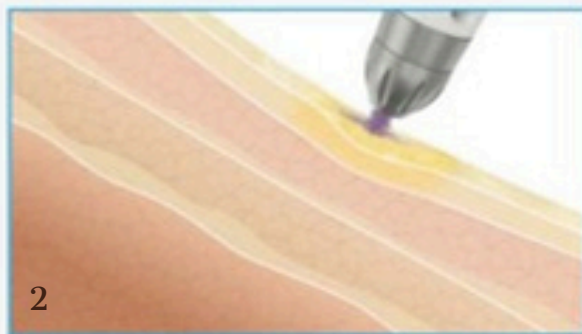

Komputer sterowana aplikacja działa z dużą precyzją i prędkością dźwięku.

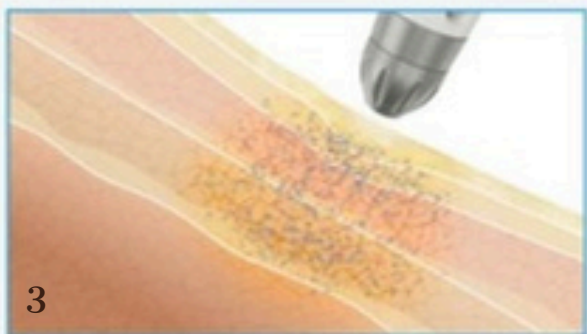

Otwiera górne warstwy skóry i w ten sposób tworzy przejście do głębokiego wnikania kwasu hialuronowego w tkankę podskórną.

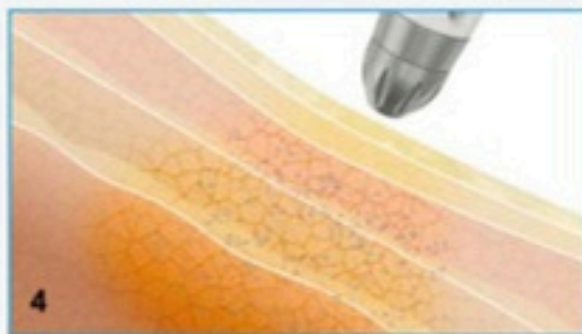

Już po kilku zabiegach, tworzone są składy, w których długotrwanie stymulują podział komórek i regenerację skóry.



Idealny program

Dla każdego rodzaju skóry

- 
- Ujędrnianie skóry twarzy, szyi, dekoltu i ramion
 - Zmniejszenie głębokości zmarszczek
 - Znaczna poprawa wyglądu skóry
 - Aktywacja naturalnej odnowy komórek
 - Bezbolesny, bezpieczny i bezkontaktowy zabieg
 - Natychmiastowy efekt, który utrzymuje się przez długi czas
 - Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry
 - Nie ma ograniczeń wiekowych
 - Nie wymaga okresu rekonwalescencji i rehabilitacji
 - Dozwolone w czasie ciąży i karmienia piersią
 - Efekt widoczny już po pierwszym zabiegu
 - Poprawia elastyczność skóry
 - Zmniejsza hiperpigmentację
 - Redukuje cienie i worki pod oczami
 - Normalizuje wydzielanie sebum
 - Efekt przeciwstarzeniowy
 - Efekt drenażu limfatycznego, natychmiastowa eliminacja obrzęków
 - Penetracja składników aktywnych na głębokość 3,5 mm bez kontaktu / wstrzyknięcia
 - Nie ma żadnych przeciwwskazań

Zwiększ swój zwrot z inwestycji, Bez ryzyka.

X-Derma to unikalne i innowacyjne rozwiązanie do resurfacingu skóry, które łączy w sobie złuszczenie, oczyszczanie, ekstrakcję i nawilżanie, umożliwiając skuteczne zabiegi z doskonałymi wynikami. Głębokie, ale delikatne X-Derma zapewnia jednocześnie złuszczenie i odmładzanie skóry, zapewniając pacjentom kojące i odświeżające doznania. Nie ma przestoju, dyskomfortu ani podrażnień. Proste w użyciu i łatwe w utrzymaniu, a dzięki przejrzystemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i prostej obsłudze X-Derma można bezproblemowo zintegrować z każdą kliniką bez żadnego wysiłku. Jest to niezbędne dla każdej kliniki pielęgnacji skóry, ponieważ oferuje wysoki zwrot z inwestycji - praktycznie bez ryzyka.



Dlaczego X-Derma?



2 w 1: rozwiązanie synergiczne -
Głębokie Oczyszczanie, Odżywianie
i nawodnienie



Skuteczne dostarczanie
roztworów do skóry



Unikalna, obrotowa końcówka
silikonowa do głębokiego
oczyszczania i optymalnego
pokrycia



Idealna pielęgnacja skóry
chroniąca przed
zanieczyszczeniami
i toksynami




Wysoki zwrot z inwestycji,
minimalne ryzyko



Doskonałe leczenie przed laserem O
zapewniające lepsze rezultaty



Złoty Standard Jakości X-Derma

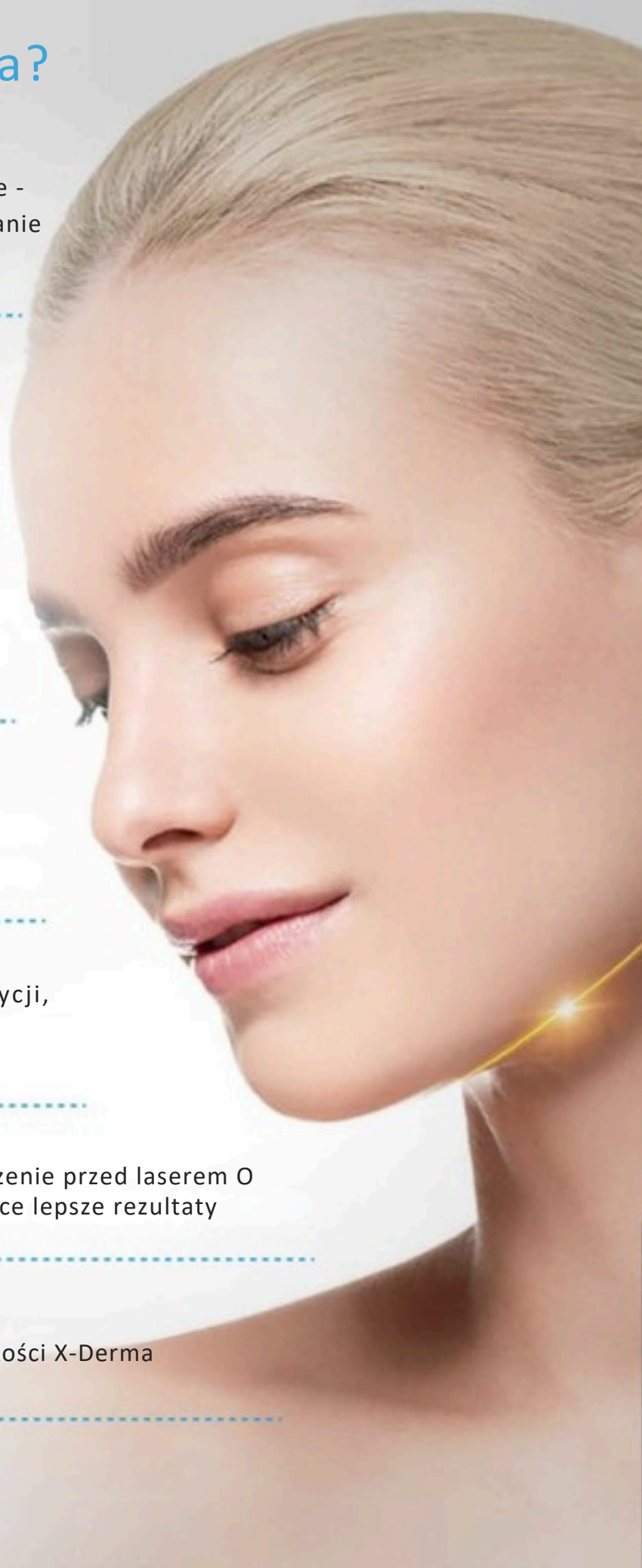


Niełatwo wywołać reakcję alergiczną
Nadaje się do każdego rodzaju skóry (w tym
skóry dojrzałej)

360°



Aktywnie regeneruj skórę wprowadzając
esencję naprawczą. Dwie opcje rozmiaru
dla lepszego dopasowania do skóry

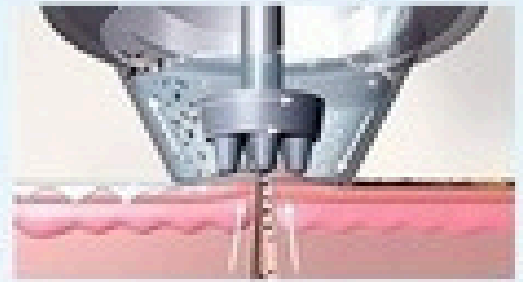

Penetracja rozwiązań

Szybkoobrotowa końcówka z silnym podciśnieniem.
Końcówka wykonana jest z elastycznego silikonu, jest
miękką i przyjemną dla skóry pacjenta.

Opatentowane wspomaganie obrotu to
rozwiązanie kosmetyczne dla lepszego
wchłaniania przez głębsze warstwy skóry



Duża sonda

(nadaje się do dużych obszarów płaszczyzny
adsorpcji, takich jak twarz, szyja i ciało)




Mała sonda

(nadaje się do adsorpcji strefy T, obszarów
wąskich lub zakrzywionych)

Bubble Shuttle posiada silikonowe główki szczoteczki o dwóch różnych twardościach:


Wersja Soft Care - Silikonowa „miękką” główka szczoteczki: Zaprojektowana wyłącznie dla kobiet. Miękką główka szczoteczki jest delikatna i może skupić się na czyszczeniu, zapewniając łagodne i komfortowe uczucie szczotkowania. Nie obciąża wrażliwej skóry. Wersja Powerful Cleaning - Silikonowa główka szczoteczki „Hard”: Wyłącznie dla mężczyzn. Twardą główka szczoteczki ma lekko silniejszą twardość, zapewniając silniejszy efekt czyszczenia. Może dokładniej usuwać uporczywe plamy oleju, zaskórniki i kuty. Jednocześnie umiejętnie bierze pod uwagę komfort, zapewniając brak uczucia pieczenia podczas użytkowania i osiągając znaczną poprawę skuteczności czyszczenia.

01

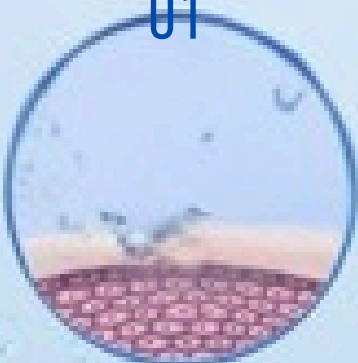

Głębokie czyszczenie

02

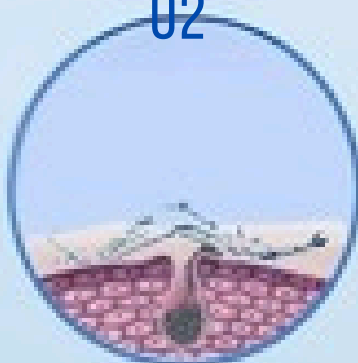

Czyste zmiękczenie

03



Odżywianie skóry

04



Naprawa i nawilżanie

X-ESTETIK



+48 518 151 673



Nasz nieinwazyjny zabieg poprawia zdrowie skóry, rozwiązuje indywidualne problemy i zapewnia niespotykany dotąd blask. W przeciwieństwie do tradycyjnych zabiegów na twarz, zabieg jest wykonywany za pomocą urządzenia, a nie ręcznie, co zapewnia głębszą penetrację i trwalsze efekty.




DANE TECHNICZNE:

Woltaż	100-120 V/ 60 Hz 200-240 V/ 50 Hz
Wyświetlacz	10,4 cala
Moc	500 W
Częstotliwość RF	0,2-0,5MHz
Ogrzewanie i chłodzenie	Gorąco 36-46 Chtód: 0-6
Ultradźwięk	1MHz
Sondy Aqua Peel Aqua Peel	Miękkie: 3szt. Twarde: 8szt.
Aqua Peel	Intensywność podciśnienia: 4-5 kg Ciśnienie podciśnienia: 96 kPa Przepływ wody: 50l
Butelka z roztworem	A: Czyszczenie B: Wybielanie i nawilżanie C: Czyszczenie głębokiej warstwy D: Czyszczenie
Łopata czyszcząca Częstotliwość	26-30MHz
Rozmiar mezoterapii EMS NANO	4X4mmX250Um
MIKRO LIFT	Częstotliwość: 200Hz Prąd: 50-800Ua
Analizator skóry	28 MILIONÓW MEGA PIKSELI HD



Zdobądź najlepszą skórę w swoim życiu

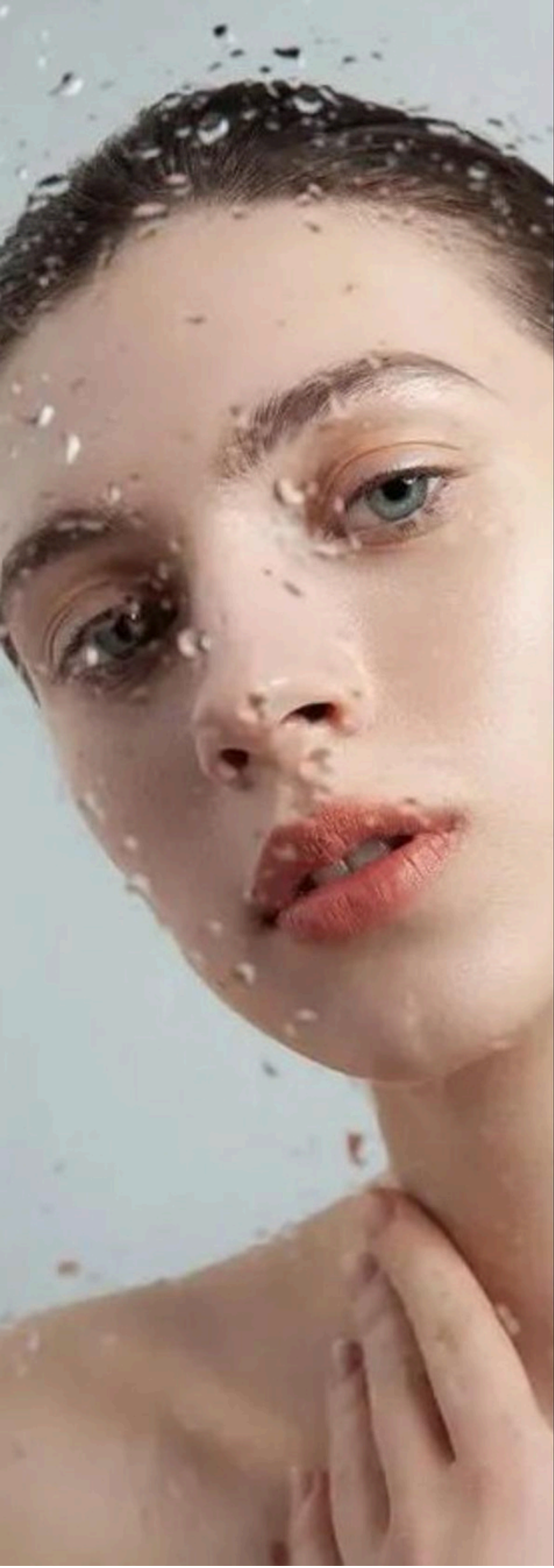

**Spełnij wszystkie
potrzeby pielęgnacji skóry!**

- Drobne linie i zmarszczki
- Elastyczność i jędrność
- Wyrównany ton i dynamika
- Tekstura skóry
- Brązowe plamy
- Skóra tłusta i zanieczyszczona
- Rozszerzone pory

3 KROKI. 30 MINUT.

Zdobądź najlepszą skórę
Twojego życia

Zapewnia natychmiastowe i długotrwałe
rezultaty, które można zobaczyć i odczuć.

KROK 1 OCZYSZCZANIE + PEELING

Odkryj nową warstwę skóry dzięki delikatnemu
peelingowi i relaksującemu resurfacingowi.

KROK 2 WYCIĄG + NAWILŻANIE

Usuń zanieczyszczenia z porów za pomocą bezbolesnego ssania.
Odżywiaj skórę intensywnie nawilżając ją kosmetykami, które ją nawilżają.

KROK 3 BEZPIECZNIK + OCHRONA

Nasącz powierzchnię skóry
przeciwutleniacze i peptydy, które zmaksymalizują Twój blask.

SYSTEM GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCY SKÓRĘ

Oczyszcza zaskórniki, trądzik i roztocza, jednocześnie dostarczając nawilżających składników odżywczych; zwęża pory, zwiększa przejrzystość skóry i poprawia jej fakturę.

Co jest w nim wyjątkowego?
Trzykrotnie większa moc głowicy operacyjnej.




Trzy główne obszary z wyraźnym podziałem pracy mogą jednorazowo przynieść trzykrotnie większy efekt.

ANTYALERGICZNY

KOJĄCY

NAPRAWA

UJĘDRNIANIE SKÓRY

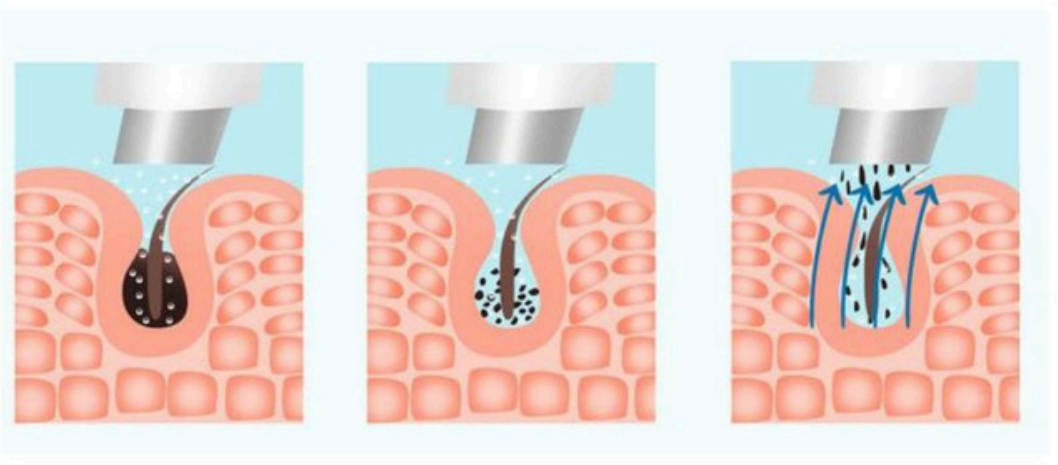

INTELIĞENTNA OBSŁUGA

- Wszelchstronne funkcje
- Wszelchstronne języki
- Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika
- Wyświetlacz 10,4"
- Platforma 10 w 1

WSZECHSTRONNA PLATFORMA 10 W1

1. PEELING WODNY



Użyj próżni, aby otworzyć pory, zapewniając głębokie oczyszczenie i łatwe usunięcie zanieczyszczeń i martwych komórek naskórka. Pozwala to również aktywnym składnikom naszych boosterów wnikać głębiej, zapewniając najskuteczniejszą możliwą kurację.

2. STRUMIEŃ TLENU



Wstrzyknięcie tlenu pod wysokim ciśnieniem, małe cząsteczki i silna penetracja Wnika głęboko w warstwę podstawną, zwiększa retencję wody i wchłania się łatwiej poprzez zwięzanie porów

3. EMS TWARZ



Nanokryształy wspomagają wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry, ponieważ otwierają kanały umożliwiające ich przenikanie przez skórę. Dzięki temu stosowane preparaty mogą być lepiej absorbowane.

4. ZIMNO-CIEPŁO



Szybko obniż temperaturę poniżej 0 stopni, aby poprawić jakość skóry i uzyskać efekt usunięcia zaczerwienienia, nadwrażliwości, ujędrnienia i wymodelowania

5. MIKRO LIFT



Mikroprąd EMS anionów i kationów naprzemiennie między dodatnim i ujemnym, tak aby kationy były importowane, a aniony eksportowane. Poprawa kontury twarzy

6. OxyGeneq



Stwórz środowisko dostarczające tlen, aktywuj komórki i zwiększ wchłanianie. Wstrzyknij produkt w głęboką warstwę skóry i współpracuj z produktami do peelingu skóry zawierającymi kwasy owocowe.

7. ULTRADŹWIĘKI



Ultradźwięki - od 1 do 3 milionów drgań na minutę otwierają pory, umożliwiając esencji szybkie wniknięcie w warstwę podstawną skóry, co pozwala na osiągnięcie wskaźnika wchłaniania przekraczającego 90%

8. RF



Sonda może emitować fale radiowe, które wibrują 6 milionów razy na sekundę. Wibracje o wysokiej częstotliwości to cząsteczki w skórze, które generują ciepło poprzez tarcie, co pozwala uzyskać efekt ujędrnienia skóry i redukcji zmarszczek.

9. Łopata czyszcząca



Użyj fal wibracyjnych o wysokiej częstotliwości, aby zmiękczyć warstwę rogową naskórka i dokładnie oczyścić skórę z zanieczyszczeń.

10. ANALIZATOR



Analizator skóry:
Najlepsze narzędzie do analizy skóry i oferowania najlepszych rozwiązań!

Typ A


1. Peeling wodny
2. TYP A (DYSZĄ TLENOwą)
3. EMS TWARZ
4. ZIMNO-CIEPŁO
5. MIKRO LIFT
6. TLEN
7. ULTRADŹWIĘKI
8. RF
9. ŁOPATA CZYSZCZĄCA
10. ANALIZATOR

Typ B

1. Peeling wodny
2. TYP B (DYSZ TLENU)
4. ZIMNO-CIEPŁO
5. MIKRO LIFT
6. TLEN
7. ULTRADŹWIĘKI
8. RF
9. ŁOPATA CZYSZCZĄCA


JAK DZIAŁA EMS FACE?

Nanokryształy wykorzystują nanokontakty o grubości ponad 250 nanometrów i długości zaledwie 0,1 mm, które mogą jedynie otworzyć warstwę rogową naskórka bez dotykania skóry właściwej. To nie tylko rozwiązuje problem wchłaniania przez skórę, ale także pozwala na bezbolesne i nieinwazyjne leczenie!

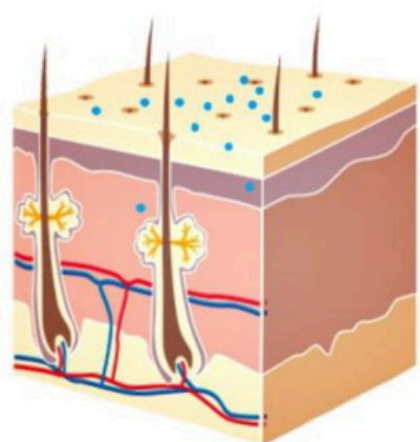


Naturalne zastosowanie i wchłanianie

W przypadku naturalnego stosowania i wchłaniania produktów do pielęgnacji skóry, cząsteczki produktów wnikają jedynie w naskórek. Trudno jest im wniknąć w głębsze warstwy skóry, a ich wchłanianie jest bardzo niskie.

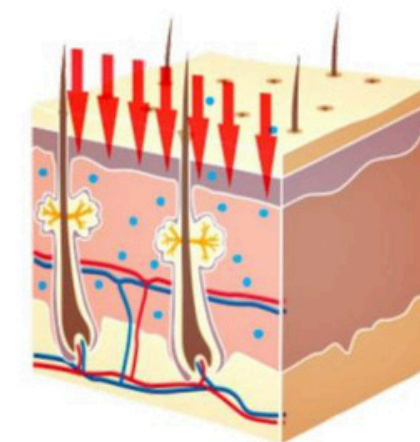

Nanokryształy nanochip (Produkt może równomiernie wnikać w skórę właściwą.)

Nanochipy przenikają jedynie przez warstwę barierową naskórka, nie naruszając naczyń krwionośnych ani nerwów. Zabieg jest bezbolesny i nieinwazyjny, a jego zdolność absorpcji znacznie się poprawia.

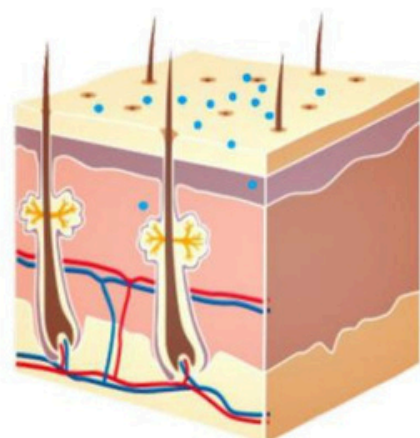


Funkcja EMS

Mikroelektroniczna technologia przewodzenia ciepła otwiera pory, co może zwiększyć stopień wchłaniania produktu o **ponad 40%**.

Wprowadzenie zasady działania nanochipu

- ⦿ Nanokryształy są wykonane z monokrystalicznego krzemu. Oprócz tego, że jest wytrzymały, monokrystaliczny krzem jest na tyle cienki i krótki, że może przebić się jedynie przez barierę absorpcyjną naskórka, a jednocześnie znajduje się z dala od naczyń krwionośnych i nerwów, więc nie odczuwa się bólu ani nie występuje krwawienie.
- ⦿ Nanokryształy wspomagają wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry poprzez otwieranie kanału absorpcyjnego skóry, dzięki czemu skóra może lepiej wchłaniać produkty do pielęgnacji skóry po wprowadzeniu nanokryształów.

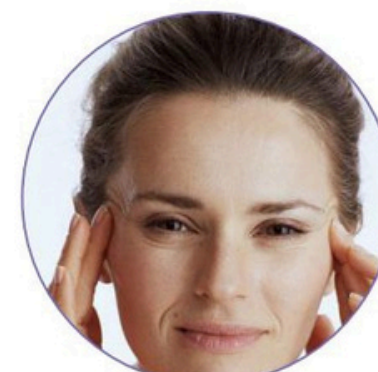


Wiotka skóra



Suchość i niedobór wody



Drobne zmarszczki wodne

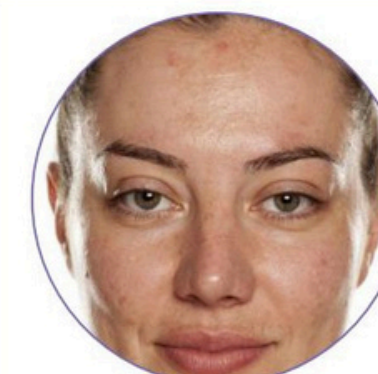

Zmęczona twarz





УСТАНОВКА
СЕРВИС
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЗБРАТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ